


MINIMO SFORZO MASSIMA PRECISIONE

La soluzione definitiva per il FULL-ARCH

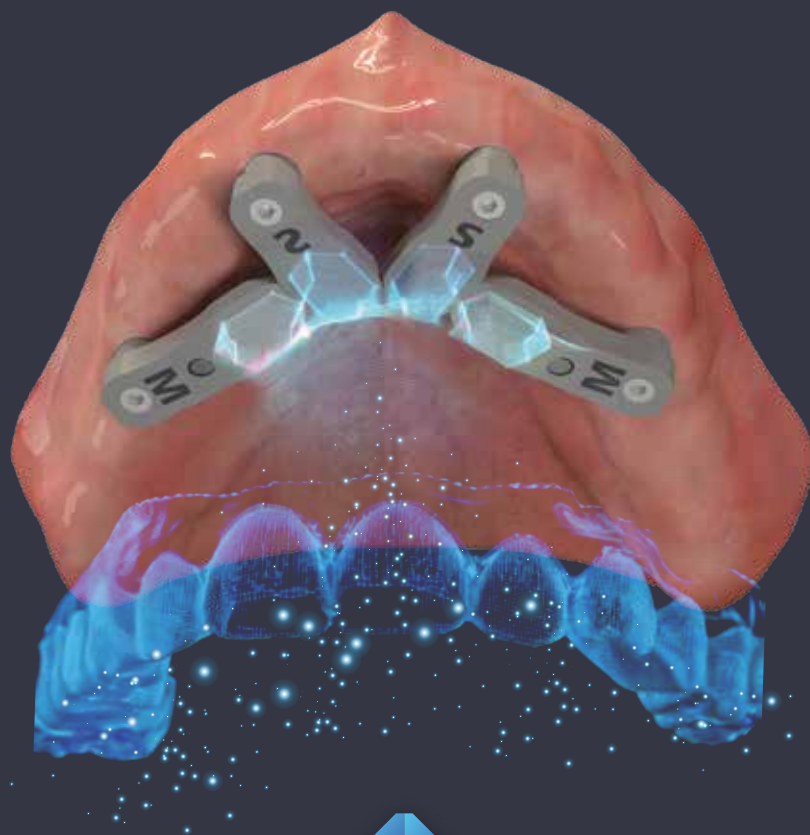

ESCLUSIVA
 revello



ioConnect™

Rilevamento MUA senza sforzo con il tuo IOS



Sistema aperto

Compatibile con qualsiasi software CAD dentale per l'importazione dei dati e la progettazione.



Rilevamento MUA senza sforzo con il tuo IOS

Potenzia il tuo IOS (scanner intra-orale) esistente per ottenere lo stesso flusso di lavoro della fotogrammetria.



Area di scansione ridotta al minimo

Concentratevi sulla scansione della sola area blu per ridurre gli errori di scansione. Facile accesso e tempi di scansione ridotti.



Tutto sulle opzioni

Sono disponibili diverse misure (S, M, L) da scegliere in base alla posizione dell'impianto e all'anatomia di ciascun paziente.


Fase 1
Ingaggiare ioConnect™
sugli abutment MUA



Fase 2
Scansione incentrata
sugli esagoni
superiori




Fase 3
Scegliere il tappo HS
preferito (2 tipi disponibili)

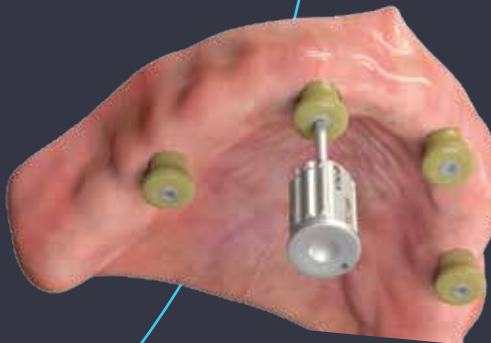

 Il tappo piccolo è incluso
nel kit completo

 Venduto separatamente

Fase 4
Scansione delle calotte HS da acquisire
come punti di riferimento
dei tessuti molli

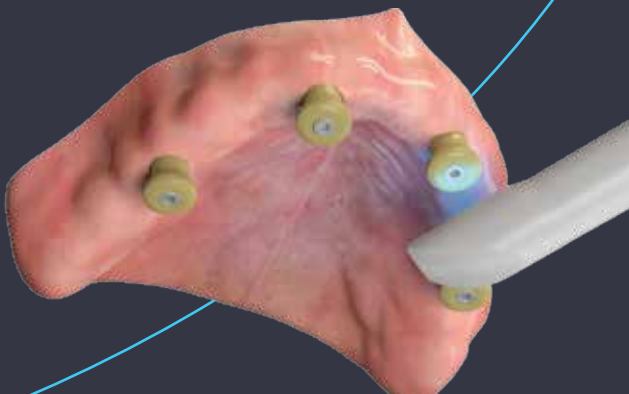

 **Suggerimento
di scansione**





Dopo aver eseguito in bocca due scansioni – una con i Flag e una con gli HS Cap montati sui MUA – solo la scansione con i Flag viene importata nell'  **ioConnect™ app**. Qui il software riconosce con precisione la posizione virtuale degli HS Cap, che verranno utilizzati come nuovi scan body nel software CAD. Successivamente, nel software CAD (ad esempio Exocad o 3Shape), si importa sia la scansione della gengiva con gli HS Cap montati sui MUA, sia il file generato da ioConnect che contiene la posizione virtuale degli HS Cap. Le due scansioni vengono allineate automaticamente, perché entrambe includono gli stessi HS Cap. A questo punto, grazie alla libreria CAD Truabutment precedentemente salvata, il software riconosce correttamente la posizione dei MUA.


Da fare



 **Suggerimento** >>>

Concentrandosi specificamente sulla porzione esagonale e *riducendo al minimo l'area di scansione*, si migliorerà la precisione.

Da non fare

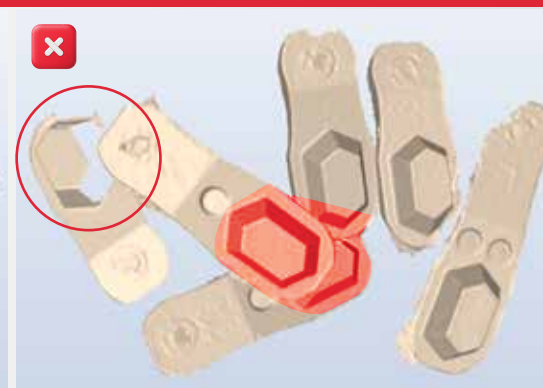

ioConnect™ Kit

All-on-T (M1.4)

x12

Tappi HS

x4 x4 x4

Rilevatore MUA
corto/medio/lungo

x1

Cacciavite manuale
esagonale da 1,27



COMPATIBILE CON:

AON
Implants

BIOHORIZONS
biologics
BIOMET 3i

camlog
Dentsply
Sirona

DESS
LYRAET.K
DIGITAL DENTAL PROTOCOL

HIOSSEN
IMPLANT
ipd

MEGAGEN
medentis
medical

Nobel
Biocare
NEODENT

Neo
Biotech
Satisfaction to Dentists
THOMMEN
Medical

uris (M1.6)

x12

Tappi HS
Compatibile

x4 x4 x4

Rilevatore MUA
corto/medio/lungo

x1

Cacciavite manuale
esagonale da 1,27



COMPATIBILE CON: **mis**
MAKE IT SIMPLE

Straumann®

ST35

x6

x2 x2 x2

ST46

x12

x4 x4 x4

Tappi HS

Rilevatore MUA
corto/medio/lungo

x1

Cacciavite
manuale torx





ioConnectTM

Effortless MUA Detection with Your IOS