



Istruzioni per l'uso

Revisione

02

Data di
emissione

30.05.2022


Aghi sterili monouso

- **Breve descrizione:** Gli aghi odontoiatrici sono esclusivamente monouso e sterilizzati con ossido di etilene.
- **Destinazione d'uso:** Aghi per iniezione, sterili e monouso, utilizzati nelle siringhe con caricamento a cartuccia per l'iniezione di anestetici odontoiatrici locali.
- **Popolazione di pazienti prevista:** Pazienti che necessitano di un trattamento odontoiatrico
- **Utilizzatore previsto:** Dentista
- **Metodo di utilizzo**




①

Rompere il sigillo ermetico
(Ruotare il tappo per aprire-
Non piegare o aprire a scatto)

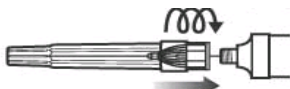

②

Avvitare l'ago sulla cartuccia
della siringa odontoiatrica

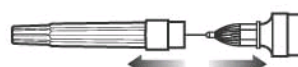

③

Rimuovere il tappo di protezione
prima dell'uso

Precauzioni

- Utilizzare dopo aver letto le istruzioni per l'uso
- Non utilizzare se il sigillo è già rotto
- Utilizzare immediatamente dopo aver rotto il sigillo; è consigliato tenere l'ago nel tappo di protezione fino al momento dell'utilizzo effettivo.
- Dopo l'utilizzo, non toccare la punta dell'ago e gettare il prodotto usando il tappo di protezione per prevenire infezioni e punture.

Avvertenze



- Non riutilizzare per evitare infezioni crociate tra pazienti
- Non risterilizzare; gli aghi sono già stati sterilizzati con ossido di etilene
- Non piegare l'ago per evitare la rottura dello stesso; se piegato, l'ago potrebbe rompersi nel tessuto e provocare lesioni



①

Non piegare la parte in metallo
dell'ago nel punto in cui si congiunge
alla parte in plastica.



②

Non piegare l'ago più volte durante l'uso,
includendo modifiche di pochi gradi di
angolazione.

- **Conservazione:** Non conservare a temperature estreme, in presenza di umidità ed evitare la luce diretta del sole.

Descrizione dei simboli:

Numero di catalogo	Fabbricante	Rappresentante autorizzato nell'Unione Europea	Paese di fabbricazione	Lotto	Identificatore univoco del dispositivo (UDI)

					
Data di fabbricazione	Data di scadenza (usare entro)	Sterilizzato mediante ossido di etilene	Sistema a barriera sterile singola con confezionamento protettivo esterno	Non risterilizzare	Non usare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso
					
Avvertenze	Non riutilizzare, monouso	Dispositivo medico	Consultare le istruzioni per l'uso	Importatore	Distributore (se applicabile)


▪ **Avviso:** in caso di incidente grave in relazione al dispositivo medico, si prega di segnalarlo al fabbricante e/o al rappresentante autorizzato e all'autorità competente.

 **Fabbricante: C-K DENTAL IND.CO.,LTD.**

88-50, Sudo-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel: +82-32-679-1204 Fax: +82-32-679-1207

E-mail: ck-dental@hanmail.com

 **Rappresentante autorizzato: Obelis s.a.**

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

Tel: +32-2-732-59-54 Fax: +32-2-732-60-03

E-mail: mail@obelis.net

