

Scheda informativa sul prodotto

FD 333 Disinfezione ad azione rapida



FD 333 in sintesi

- Soluzione priva di aldeidi, alcolica, pronta all'uso, indicata per la disinfezione rapida delle superfici di dispositivi medici invasivi e non invasivi nonché inventario medico presso studi medici, laboratori e cliniche.
- Tempo di azione in conformità a VAH, incl. batteri Tbc, di solo 1 minuto.
- Limitatamente virucida PLUS (virus capsulati, incl. HBV, HCV, HIV, coronavirus nonché adenovirus e norovirus non capsulati).
- Testato secondo le attuali metodologie VAH e le norme europee.
- Lista VAH, lista disinfettanti IHO.
- Testato in conformità alle norme EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615 e nel 4-field test in conformità a VAH e alla norma EN 16615.
- Buona compatibilità con i materiali.
- Asciugatura rapida e senza residui.
- Profumo particolarmente piacevole – freschezza di limone.
- Particolarmente raccomandato per l'uso in combinazione con FD multi wipes/FD multi wipes compact.

Proprietà

FD 333 della linea Dürr System-Hygiene è una soluzione priva di aldeidi, a base alcolica e pronta all'uso, indicata per la disinfezione rapida delle superfici resistenti all'alcol di dispositivi medici invasivi e non invasivi nonché inventario medico presso studi medici, laboratori e cliniche. FD 333 è caratterizzato da una rapida efficacia e una buona compatibilità con i materiali. Le superfici disinfettate si asciugano rapidamente. Si consiglia vivamente di utilizzare FD 333 in combinazione con FD multi wipes/FD multi wipes compact.

Composizione del prodotto

FD 333 contiene una combinazione di alcol e composti di ammonio quaternario. 100 g di FD 333 contengono 62 g di etanolo, 0,05 g di didecil-dimetil-ammonio cloruro, additivi e acqua.

Efficacia microbiologica

Spettro di azione di FD 333: battericida¹⁾, tubercolicida¹⁾, fungicida¹⁾, limitatamente virucida PLUS (virus capsulati, incl. HBV, HCV e HIV^{2), 3)}, nonché adenovirus¹⁾ e norovirus^{1), 4)} non capsulati). FD 333 è incluso nella lista VAH e lista disinfettanti IHO. Testato in conformità alle norme EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615.

Uso

FD 333 si utilizza non diluito. Versare FD 333 su un panno e passarlo accuratamente su tutte le superfici. Strofinare le superfici e gli oggetti da disinfettare e lasciar agire il preparato. Disinfettare le superfici visibilmente contaminate con FD 333 e rimuovere le tracce di contaminazione. Disinfettare ancora una volta le superfici pulite. Verificare che tutte le superfici siano bagnate durante tutto il tempo di azione. Il tempo di azione in conformità a VAH è di 1 minuto, per le muffe di 5 min. Usare le salviette multi FD/FD multi wipes compact imbevute di FD 333 allo stesso modo.

Impatto sull'ambiente

La confezione in polietilene e polipropilene può essere destinata sia al recupero materiale che alla termovalorizzazione. Ai fini del riciclaggio, sciacquare il flacone con acqua.

Scheda informativa sul prodotto

FD 333 Disinfezione ad azione rapida

Per ulteriori indicazioni consultare la scheda dati di sicurezza.

Dati fisici

Aspetto: soluzione limpida e incolore

Densità: $D = 0,88 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

Punto di infiammabilità: 22 °C (a norma DIN 51755)

Durata

3 anni

Dopo l'apertura nella confezione originale chiusa fino alla data di scadenza di 3 anni (a condizione che la conservazione sia appropriata).

Se usato con FD multi wipes/FD multi wipes compact 3 mesi ma non oltre la data di scadenza (a condizione che la conservazione sia appropriata).

Confezioni

Tanica da 10 l

Flacone da 2,5 l

Flacone da 1 l

Flacone da 750 ml per Hygowipe Plus

Conservazione

Conservare il preparato a una temperatura compresa tra 5 °C e al massimo la temperatura ambiente.

Accessori

Flacone spray (600 ml), testina nebulizzatrice per flacone da 1 l, rubinetto per tanica, FD multi wipes/FD multi wipes compact

Avvertenze generali

Disinfettare i dispositivi medici, quali telecamere intraorali, turbine, manipoli e contrangoli, prima del ricondizionamento prescritto secondo le indicazioni del fabbricante. Prestare attenzione in caso di materiali sensibili all'alcol (ad es. vetro acrilico o materiali analoghi). In caso di superfici delicate, verificare la resistenza del materiale in un punto non visibile. Istruzioni antincendio e antiesplorazione: vedere il regolamento DGUV 107-002/BGR 206. Non mischiare FD 333 con altri prodotti. Il prodotto è soggetto ad alte-

Distributore

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germania
www.duerdental.com
info@duerrdental.com

Produttore

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germania
www.orochemie.de
info@orochemie.de

Uso	Tempo
Disinfezione di superfici (metodologie VAH) ¹⁾	1 min
Batteri ¹⁾ e lieviti ¹⁾	1 min
Batteri Tbc ¹⁾	1 min.
Muffe ¹⁾	5 min.
Virus capsulati, incl. HBV, HCV, HIV, coronavirus ^{2), 3)}	1 min.
Adenovirus ¹⁾	1 min
Norovirus ^{1), 4)}	1 min

1) Test con carica ridotta (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 16615, EN 14476).

2) Il test con adenovirus e MNV (EN 14476) comprende virus capsulati incl. HBV, HCV, HIV.

3) In conformità alle raccomandazioni del RKI (Robert Koch-Institut) (Gazzetta Federale della Sanità 60, 353 - 363, 2017).

4) Test con carica elevata (EN 14476).

razioni di colore/odore, soprattutto se non viene conservato al riparo dalla luce solare. Queste alterazioni di colore e/o odore non influenzano tuttavia le prestazioni disinfettanti del prodotto. L'uso è riservato a personale qualificato. Tutti gli eventi gravi verificatisi in relazione al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro.

Avvertenze relative ai pericoli

FD 333 è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP: vedere l'etichettatura del prodotto e la scheda di dati di sicurezza.

Perizie indipendenti - indagini interne

Le perizie sono disponibili su richiesta.

CE 0124