

Prodotti per la disinfezione

# ZEFIROL®

**La disinfezione  
dello studio  
non è un gioco  
da ragazzi**



Gamma completa di prodotti per la  
disinfezione dello studio dentistico

# Molteni Dental lo sa!



Molteni Dental ti propone una gamma completa di prodotti per la disinfezione dello studio dentistico, che **non contiene aldeidi** e si basa su efficaci principi attivi con caratteristiche di bassa tossicità associate ad una elevata biodegradabilità

Zefirol® offre una linea completa per la disinfezione quotidiana di livello intermedio nella pratica odontoiatrica.

La produzione è in linea con la direttiva dei dispositivi medici 93/42/EEC, inoltre è realizzata considerando la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente e la concezione di prodotti ad elevata biodegradabilità.

Senza glutaraldeide, formaldeide e derivati fenolici per il massimo rispetto dell'ambiente ed il minimo rischio allergico, elevata compatibilità con i materiali utilizzati negli studi odontoiatrici sono altre importanti caratteristiche della linea Zefirol®.



## ZEFIROL® QUICK disinfettante per apparecchiature e strumenti

ZEFIROL® QUICK in nebulizzatore è ideale per la disinfezione rapida ed efficace di strumentario, apparecchiature biomedicali e poltrone nello studio odontoiatrico.

### Le caratteristiche principali:

- pronto all'uso
- rapida azione disinfettante:  
30 sec. battericida e fungicida  
30 sec. tubercolicida  
2 min. attivo contro i virus HBV/HIV  
2 min. attivo contro il virus HCV
- materiale di facile utilizzo su tutte le superfici compatibili con prodotti a base alcolica
- non contiene gas propellenti

### Confezione in commercio:

- flacone da 1 litro con nebulizzatore
- ricambio da 1 litro
- ricambio nebulizzatore



**NOVITA':** vaschetta e



**ZEFIROL® TS**  
disinfettante  
per strumentario  
e piccole superfici

ZEFIROL® TS sono fazzoletti preumidificati, pronti all'uso per la disinfezione rapida di strumenti, apparecchiature medicali e riuniti odontoiatrici.

**Le caratteristiche principali:**

- fazzoletti in tessuto non tessuto, molto resistenti
- grande formato, utile nello studio odontoiatrico (cm 20x14,5)
- rapida azione disinfettante:  
30 sec. batterica/fungicida,  
30 sec. tubercolocida  
2 min. HBV/HIV  
2 min. HCV

**Confezione in commercio:**

- flacone da 150 fazzoletti
- refill da 120 fazzoletti



**ZEFIROL® FOAM**  
disinfettante  
per poltrone  
odontoiatriche

ZEFIROL® FOAM è una nuova formulazione schiumogena, che abbina alla disinfezione una perfetta pulizia e manutenzione delle superfici delicate nello studio odontoiatrico. Particolarmente indicato per l'impiego sulle superfici delle poltrone odontoiatriche, lampade ecc. Oltre ad una buona disinfezione ZEFIROL® FOAM nutre la pelle e i materiali sintetici impedendone l'invecchiamento.

**Le caratteristiche principali:**

- spettro d'azione:  
HVB/HIV 5 min.  
Battericida e fungicida 10 min.
- forma una schiuma per una disinfezione e pulizia completa
- con l'utilizzo giornaliero si evitano screpolature e secchezza dei rivestimenti delle poltrone odontoiatriche
- il flacone non contiene gas propellente

**Confezione in commercio:**

- flacone da 200 ml



**ZEFIROL® IM**  
disinfettante liquido  
per impronte dentali, protesi  
e apparecchi ortodontici

ZEFIROL® IM è un disinfettante liquido studiato specificatamente per risolvere il problema della disinfezione di impronte, apparecchi ortodontici e protesi.

**Le caratteristiche principali:**

- ZEFIROL® IM è una moderna formulazione a base di "benzalcoloro cloruro" ed è priva di aldeidi
- rapida attività antimicrobica nei confronti di batteri (3 min), virus HBV/HIV/HCV (1 min), funghi (3 min)
- ottima compatibilità con tutti i materiali per impronta (siliconi, polieteri e alginati), non altera la precisione dell'impronta
- ottima capacità detergente, scioglie sangue, saliva e facilita l'eliminazione del tartaro
- facile preparazione del bagno grazie alla formulazione liquida
- materiale dal profumo fresco, non irritante e completamente biodegradabile
- ideale per l'impiego nello studio dentistico e nel laboratorio odontotecnico

**Confezione in commercio:**

- flacone da 1 litro



**ZEFIROL® SF**  
disinfettante  
per strumenti e frese dentali

ZEFIROL® SF è un concentrato studiato per la pulizia e la disinfezione di strumenti e frese. Il prodotto non contiene aldeidi ed è basato su una formulazione che ne permette il facile smaltimento.

**Le caratteristiche principali:**

- ampio spettro d'azione nei confronti di batteri, TBC, virus HBV/HIV e funghi
- azione disinfettante:  
15-30 min. HBV/HIV  
15-30 min. battericida/fungicida  
60 min. tubercolocida
- privo di aldeidi, non provoca aloni marroni a mani e superfici trattate
- scioglie le sostanze organiche e inorganiche
- preserva l'affilatura di strumenti taglienti
- gradevole odore della soluzione, che può essere smaltita senza problemi

**Confezione in commercio:**

- flacone da 2 litri

Per tutti i disinfettanti della linea Zefirol® sono disponibili le perizie di efficacia contro i microrganismi. Per la richiesta inviare una email a [info@moltenidental.it](mailto:info@moltenidental.it)

**DISINFETTANTI      ZEFIROL® QUICK      ZEFIROL® TS      ZEFIROL® FOAM      ZEFIROL® IM      ZEFIROL® SF**

<b>CAMPI D'IMPIEGO</b>	Superfici, strumentario ed apparecchiature	Superfici, strumentario ed apparecchiature	Poltrone odontoiatriche e superfici delicate	Impronte dentali, apparecchi ortodontici e protesi	Strumenti e frese dentali
<b>PRINCIPI ATTIVI</b>	Etanolo 2-Propanolo Composti ammonio quaternario	Etanolo 2-Propanolo	2-Propanolo Composti ammonio quaternario	Benzalconio cloruro	Composti ammonio quaternario Inibitori di corrosione
<b>MODALITÀ D'USO</b>	Nebulizzare il prodotto direttamente sulle superfici da disinfettare	Strofinare le superfici da disinfettare	Applicare la schiuma sulle superfici da trattare. Asciugare con panno	Immergere in soluzione acquosa al 2% per cinque minuti o al 3% per tre minuti	Da diluire al 2%. Sostituire il bagno quotidianamente in caso di uso frequente
<b>ATTIVITÀ HBV/HIV</b>	2 minuti	2 minuti	5 minuti	1-2 minuti	15-30 minuti
<b>ATTIVITÀ HCV</b>	2 minuti	2 minuti	NO	1-2 minuti	5 minuti
<b>ATTIVITÀ FUNGICIDA BATTERICIDA</b>	30 secondi	30 secondi	10 minuti	3-5 minuti	15 minuti
<b>ATTIVITÀ TUBERCOLICIDA</b>	30 secondi	30 secondi	NO	NO	60 minuti



Molteni Dental srl  
Via Console Flaminio 5/7  
20134 Milano  
Tel. +39 02 30353088 Telefax + 39 02 30353092  
E-mail: info@moltenidental.it  
www.moltenidental.it