

zeta 7 solution

IMPRESSIONS



**LIQUID DISINFECTANT
FOR IMPRESSIONS**

CONCENTRATED

USE AT 1%



U118204/A

PGCE 0123

Zhermack[®]
CLINICAL



Zhermack SpA
Via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (Rovigo) - Italy
tel. +39 0425 597611 - fax +39 0425 53596
www.zhermack.com - info@zhermack.com

Last Update: 12/2009

Disinfettante per impronte liquido concentrato.

Zeta 7 Solution è un disinfettante concentrato privo di aldeidi ad ampio spettro, messo a punto e testato secondo le nuove norme armonizzate europee sulla disinfezione. Zeta 7 Solution è indicato per la rapida disinfezione ad alto livello di impronte in silicone (per addezione e condensazione), alginati, polieterei e polisolfuri: le impronte rimarranno inalterate, mantenendo le caratteristiche di stabilità dimensionale e di compatibilità con i gessi.

COMPOSIZIONE: 100 g di Zeta 7 Solution contengono 7.7 g di dimetil-didecil-ammonio cloruro, 15 g di fenossietanolo, tensioattivi non ionici, additivi, ausiliari ed acqua q.b. a 100.

SPETTRO D'AZIONE: Battericida, fungicida (test su *Candida albicans*), tubercolicida, virucida. Attività in sospensione testata secondo le norme EN13727, EN13624, EN14348. Attività di superficie testata secondo la norma EN14563. Attività virucida testata secondo la norma EN14476.

USO: Subito dopo la presa d'impronta sciacquare l'impronta sotto acqua corrente per 30 secondi. Immergere l'impronta per 10 minuti nella soluzione di Zeta 7 Solution all'1% (utilizzare il serbatoio graduato del flacone per dosare 10 ml di Zeta 7 Solution da aggiungere per ogni litro d'acqua). Prelevare l'impronta dalla vaschetta e risciacquarla accuratamente. Si raccomanda di attenersi al tempo d'immersione raccomandato. Sostituire la soluzione frequentemente, soprattutto in caso di elevata contaminazione organica (sangue, saliva).

Attività in sospensione:	1 minuto	battericida (EN13727)
	1 minuto	fungicida (EN13624, test su <i>Candida albicans</i>)
	1 minuto	tubercolicida (EN14348)
Attività di superficie:	2.30 minuti	tubercolicida (EN14563)
Attività virucida:	10 minuti	condizioni di "sporco" (EN 14476)

AVVERTENZE, PRECAUZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE: Il prodotto è destinato all'impiego da parte di operatori qualificati, con conoscenza delle dovute norme di sicurezza. Utilizzare guanti protettivi. Operare in locali ben aerati. Conservare il prodotto ben chiuso, al fresco e all'asciutto. Evitare il contatto di Zeta 7 Solution con altri disinfettanti o detersivi. Eventuali lievi differenze di profumazione sono dovute alla presenza di fragranze naturali e non pregiudicano la qualità del prodotto.

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA: R34: Provoca ustioni. - R37: Irritante per le vie respiratorie. - R20/22: Nocivo per inalazione e ingestione.

R52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Le MSDS (Material Safety Data Sheet - Schede di sicurezza prodotto) possono essere scaricate in formato PDF dal sito web: www.zhermack.com