

Alveogyl

Medicazione alveolare emostatica



Composizione

Penghawar djambi, eugenolo, sodio laurilsolfato, carbonato di calcio, eccipienti.

Proprietà

ALVEOGYL è una pasta per medicazione alveolare dopo estrazione dentale, composta di fibre di Penghawar. La pasta permette l'emostasi per compressione e protegge dalla superinfezione (alveolar osteitis) grazie al suo effetto barriera.

Inserita nell'alveolo, ALVEOGYL aderisce facilmente grazie alla sua struttura fibrosa. Per effetto dei movimenti della lingua del paziente, la pasta viene eliminata progressivamente senza l'intervento del medico, consentendo la cicatrizzazione naturale della ferita.

ALVEOGYL è molto facile da applicare e non richiede alcuna attenzione particolare da parte del medico, tranne il monitoraggio del processo di cicatrizzazione.

Indicazioni

ALVEOGYL è una pasta utilizzata come medicazione alveolare nei casi di alveoliti secche o dopo un'estrazione dentale difficile o traumatica nei pazienti con una storia di alveoliti secche.

Controindicazioni

Non utilizzare nei pazienti con allergia conosciuta ad uno dei componenti. Non utilizzare sui denti decidui (bambini con meno di 12 anni).

L'utilizzo ripetuto del prodotto come medicazione alveolare dopo un'estrazione è controindicato.

Modalità d'uso

Prelevare una piccola pallina di pasta (circa 0.20 g) ed inserirla nell'alveolo dentale preparata in via preliminare.

Non suturare.

Avvertenze e precauzioni d'uso

Avvertire il paziente di non sciacquare energicamente la bocca nelle 24 ore che seguono l'estrazione.

Non trattare più di 5 denti in una sola seduta.

Xi – Irritante

- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- Irritante per la pelle.
- Evitare il contatto con la pelle.
- Usare guanti idonei.
- Il prodotto ed il recipiente devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Chiudere il vasetto immediatamente dopo l'uso.

Presentazione

Vasetto che contiene 25 g di pasta.

Riservato all'uso professionale in odontoiatria

