



Prima di usare questo prodotto leggere attentamente e seguire le raccomandazioni contenute nei manuali istruzioni forniti in origine con il vostro dispositivo ed impianto. Attenzione particolare dovrà essere posta alle precauzioni per la sicurezza.

Descrizione prodotto

AIR-FLOW® Perio (polvere per profilassi) si usa per trattamenti sottogengivali.

Questa polvere si usa presso gli studi dentistici con dispositivi EMS di lucidatura ad aria.

Applicazioni

Questa polvere consente la rimozione del biofilm sottogengivale ed è consigliata per le seguenti procedure:

- Rimozione del biofilm paradontale,
- Mantenimento della terapia paradontale dopo il completamento della terapia iniziale,
- Mantenimento dell'impianto (compreso il titanio lucidato),

Questa polvere può essere utilizzata nelle applicazioni sopragengivali standard come descritto nel sistema manuale ed è particolarmente idonea per le applicazioni sopragengivali sensibili, come:

- Colorazione attorno al solco
- Trattamento in presenza di compositi nascosti
- Pulizia delle aree sensibili

Impiego

Per le tasche paradontali di oltre 5 mm (meno di 9 mm) utilizzare l'ugello di flusso paradontale per 5 secondi massimo.

Per le tasche paradontali poco profonde (meno di 5 mm), usare il manipolo del flusso d'aria standard per spruzzare su ogni lato del dente (vestibolare, mesiale, orale distale, linguale) per un massimo di 5 sec. per tasca.



Non concentrare lo spray su un punto, usare un movimento circolare per acquisire una pulizia omogenea.



L'angolo della punta del manipolo rispetto al dente può variare fra 30° e 60°. Più piccolo è l'angolo e maggiore sarà la distanza a cui lo spruzzo arriverà nella tasca.

Controindicazioni



I pazienti che soffrono da infezioni del tratto respiratorio superiore, di bronchite cronica o di asma non devono in alcun caso essere trattati con un dispositivo di lucidatura ad aria. Il getto d'aria e di polvere potrebbe causare difficoltà respiratorie.



Le persone predisposte possono essere sensibili al glicocol. Se si osservano reazioni allergiche, smettere di utilizzare il prodotto e rimuovere completamente la polvere dalla bocca.



Il trattamento di sacche periodontali profonde può causare batteremia. Applicare le restrizioni appropriate al trattamento di pazienti a rischio (livello di immunità generale ridotto, endocardite).



Non dirigere il getto della polvere verso otturazioni, corone o ponti in quanto potrebbe danneggiare questi restauri.

Raccomandazioni per il trattamento



Il paziente e l'utente devono indossare una protezione oculare.



L'utente deve indossare maschera e guanti.



Utilizzare la cannula di aspirazione ad alta velocità del vostro riunito odontoiatrico.



Questa polvere non permette di rimuovere calcoli e tartaro.



Applicare Vaseline® sulle labbra del paziente.



Lavarsi le mani dopo l'uso.



Lavare il viso del paziente dopo l'uso (ad es. con salviettine umide).

Informazioni generali

- Non superare il limite di riempimento della polvere come indicato sul la camera a polvere.
- Questa polvere non contiene zucchero.

Immagazzinamento e durata

- La polvere non deve essere immagazzinata vicino a fonti di calore.
- Condizioni di immagazzinamento: da -10° C a 25° C e dal 10% al 95% di umidità relativa.
- Non usare dopo la data di scadenza.

Disponibile anche:

- AIR-FLOW® CLASSIC disponibile nei gusti Lemon (Limone), Mint (Menta), Cassis (Ribes nero), Cherry (Ciliegia), Tropical (Tropicale) e Neutral (Neutro). (per trattamenti supra gengivali)
- AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT (per trattamenti sopragengivali)
- AIR-FLOW® SOFT (senza sale per trattamenti supra gengivali).
- AIR-FLOW® PLUS (senza sale per trattamenti sopragengivali e sottogengivali).

Composizione della polvere :

- Glycine
- Silice amorfa