

ALGINOPLAST®

Istruzioni per l'uso



Heraeus Kulzer
D-41538 Dormagen

Made in Germany

**Heraeus
Kulzer**
Dentist Products Division

65982410 / ZA 708.02 / 8.99

regular set / fast set

Campo di applicazione: ALGINOPLAST® è adatto per tutte le impronte in cui si può impiegare alginato a presa rapida.

Caratteristiche: *regular set:* Alginato, di colore giallo, senza polvere.

fast set: Polvere di color salmone privo di formazione di pulviscolo a base di alginato.

Accessori per il dosaggio: misurino per la polvere e recipiente graduato per l'acqua.

Modo d'impiego: Il contenuto di ogni confezione deve essere protetto dall'umidità e dovrà essere versato subito dopo l'apertura nel barattolo richiudibile. (Aprire e travasare sempre una confezione alla volta.) Rigrare il barattolo prima del prelievo per 2 - 3 volte per smuovere la polvere.

Rapporto di miscelazione: 23 g polvere : 50 ml H₂O

Dosaggio: 1 oppure 2 misurini $\hat{=}$ 8,2 g (16,4 g) di polvere : 18 ml (36 ml) d'acqua (corrispondente alla linea inferiore o superiore del misurino per l'acqua).

Prelevare con delicatezza dal barattolo un misurino raso di ALGINOPLAST®. Versare in una vaschetta di miscelazione pulita ed aggiungere la quantità d'acqua misurata. Per un'impronta totale più estesa occorrono in media due misurini di ALGINOPLAST® e la corrispondente quantità d'acqua necessaria.

Miscelare con una spatola fino ad ottenere una consistenza omogenea. Utilizzando apparecchi di miscelazione automatici attenersi alle istruzioni del fabbricante.

	regular set	fast set
Tempo di miscelazione:	30 sec.	30 sec.
Tempo di manipolazione: *)	90 sec.	60 sec.
Permanenza nel cavo orale:	90 sec.	60 sec.
Tempo di presa: *)	180 sec.	120 sec.

I tempi (*) suddetti sono a partire dall'inizio della miscelazione e si riferiscono ad acqua con una durezza di 13 (gradi Tedeschi) ed ad una temperatura della miscela di 23°C. Temperature superiori accorciano i tempi suddetti, mentre temperature inferiori li allungano. Eventuali variazioni del grado di durezza dell'acqua usata per la miscelazione possono causare scostamenti dai tempi sopraindicati (se si usa acqua distillata, i tempi di manipolazione e tempi di presa aumentano di 30 secondi).

Colatura: La maggiore precisione del modello viene raggiunta se dopo il rilevamento si sciacqua l'impronta e si provvede subito a colarla, per es. con MOLDANO®, MOLDASTONE® oppure con MOLDASYNT®. Se tuttavia non fosse possibile colarla subito, conservare l'impronta in ambiente umido.

Disinfezione: Le impronte possono essere trattate con soluzioni disinfettanti comunemente usati. In questo caso. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di disinfezione / utilizzo dei rispettivi fabbricanti.

Conservazione: Chiudere il barattolo di ALGINOPLAST® e tenerlo in luogo asciutto ad una temperatura di 25°C.

Data di scadenza: vedi timbro.

I La nostra consulenza in merito alle tecniche di applicazione sia verbale che scritta e sperimentale si basa sullo stato della scienza, tuttavia vale solo come indicazione non vincolante, anche in riferimento ad eventuali diritti di terzi e non vi esonera dall'effettuare prove in proprio dei prodotti da noi forniti onde appurarne l'idoneità all'uso ed ai processi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei prodotti avviene al di là delle nostre possibilità di controllo e rientra pertanto solo ed esclusivamente nella vostra responsabilità. Garantiamo una qualità ineccepibile dei nostri prodotti in conformità alle nostre Condizioni generali di vendita e di fornitura.