

ALGINoplast xantALGIN

Specifiche secondo ISO 1563 1990		Alginoplast Fast	Xantalgin Select
Colore		Arancione	Verde
Dosaggio	g/ml	23/50	21/50
Tempo di miscelazione	Sec	30	30
Tempo di manipolazione (*)	Sec	60	60
Permanenza cavo orale	Sec	60	60
Tempo di presa (*)	Sec	120	120
Resistenza alla compressione	Mpa	1.20	1.10
Resistenza alla trazione	N/mm	1.11	1.34
Recupero dopo deformazione	%	96.8	96.9
Limite di compressione	%	15.8	15.8
Riproduzione dettaglio	Micron	50	25
Stabilità dimensionale (°)	Giorni	2	2

(*) i tempi sono a partire dall'inizio della miscelazione e si rifiniscono ad acqua con una durezza di 13 gradi Tedeschi e T di 23°C. Temperature superiore accorciano i suddetti tempi, mentre temperature inferiori li allungano.

(°) la maggior precisione del modello viene raggiunta se dopo il rilevamento si sciacqua l'impronta e si provvede subito a colarla per esempio con MOLDANO, MOLDASTONE o MOLDASYNT. Se non fosse possibile, conservare l'impronta in ambiente a umidità 100%.


Disinfezione: le impronte possono essere trattate con apposite soluzioni disinfettanti seguendo le specifiche istruzioni.



Regole d'oro per ottenere le migliori impronte in alginato:


- Conservare il prodotto in un box chiuso e in luogo asciutto
- Agitare il contenitore dell'alginato prima dell'uso
- Usare spatole e scodelle asciutte
- Rispettare le proporzioni (polvere/acqua)
- Mettere prima la polvere e poi il liquido
- Usare acqua depositata e a temperatura ambiente
- Non lasciare immersa l'impronta in acqua o liquidi disinfettanti

- Ove possibile colare subito il modello (entro 15 min)
Dovendo trasmettere l'impronta, conservarla in ambiente ad umidità 100%: box con coperchio ermetico (tipo frigorifero) e con una griglia di separazione, sotto essa una spugna umida, sopra l'impronta controllando che non ci sia contatto tra queste.

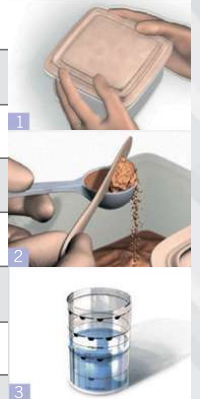

xantALGIN select ALGINoplast

gli alginati leader di mercato dal 1960

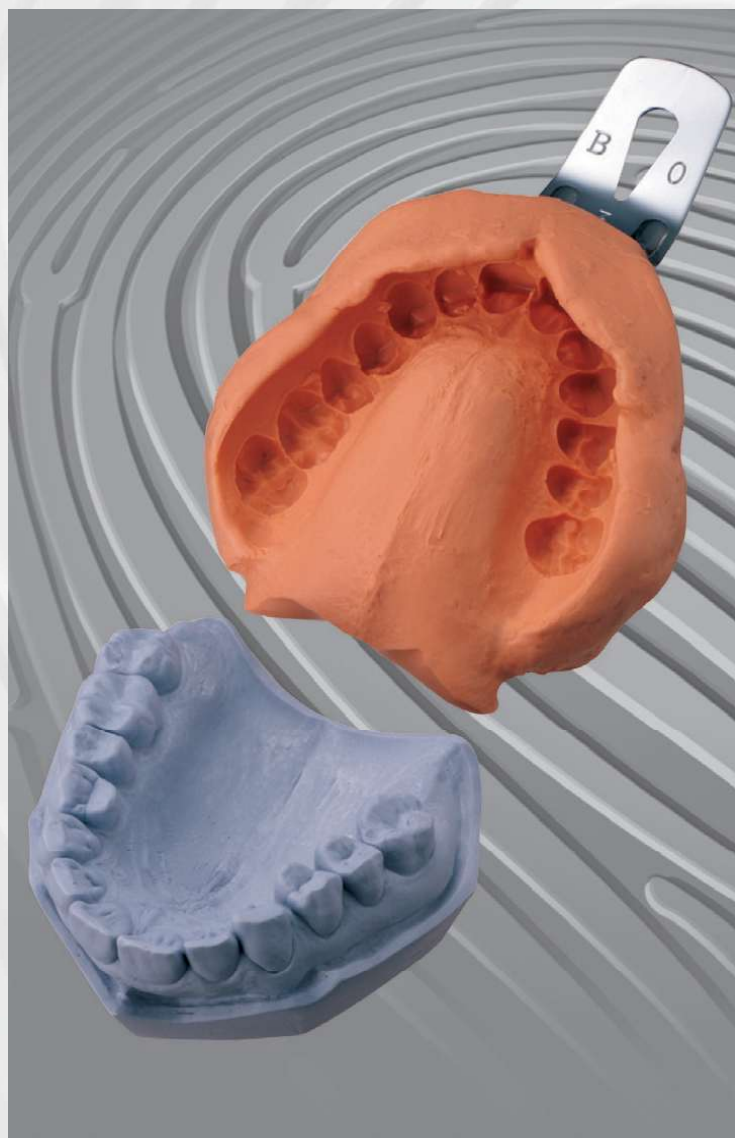

xantALGIN select (Tipo pudding - cremoso)

- Perfetta combinazione tra elasticità e resistenza: adatto in ortodonzia
- Riproduzione dettaglio 25 micron
- Eccellente compatibilità con il gesso
- Facile da leggere grazie al colore verde
- Facile da miscelare grazie alla consistenza cremosa
- Gusto leggero di menta



ALGINoplast (Tipo stiff - rigido)

- Consistenza classica: rigida durante la miscelazione permette la presa dell'impronta rigida - adatto in protesi mobile/antagonista
- Facile da utilizzare e veloce
- Versione Fast - Permette il passaggio ad una versione Normal Set con un diverso dosaggio
- Eccellente compatibilità con il gesso
- Gusto leggero di menta

