



Flexitime®

Istruzioni per l'uso

**Heraeus
Kulzer**
Dentist Products Division

Vinilpolisilossano Sistema per impronta.

Tutto l'assortimento **Flexitime®** viene dosato con un rapporto di miscelazione 1 : 1 (volume o peso).

Argomentazioni pratiche

L'assortimento di **Flexitime®** viene incontro a tutte le esigenze tecniche di rilevamento d'impronta fornendo una gamma di prodotti che possono essere utilizzati individualmente in tutte le tecniche d'impronta.

Se ne sconsiglia l'utilizzo in combinazione con altri materiali siliconici.

I barattoli devono essere chiusi accuratamente dopo l'uso. Non invertire i coperchi, i tappi o i cucchiaini.
Al momento dell'utilizzo della cartuccia far fuoriuscire un po' di prodotto prima di inserire il puntale di miscelazione. Dopo l'uso, utilizzare il puntale di miscelazione come tappo della cartuccia. Immediatamente prima del successivo utilizzo fare fuoriuscire un po' di prodotto ed inserire un nuovo puntale di miscelazione.

L'utilizzo di guanti di lattice, di soluzioni per retrazione gengivale o il contatto con restauri in composito di recente realizzazione con tutti i materiali siliconici da impronta a polimerizzazione per addizione, può provocare cambiamenti nella polimerizzazione.

Realizzazione del Modello:

La colatura deve avvenire dopo 15 min. dalla rimozione dell'impronta dalla bocca.
Non vi sono altre limitazioni. L'impronta rimane stabile nel tempo.

Gessi per modelli consigliati:

Si possono utilizzare tutti i gessi per modelli disponibili sul mercato.
Si consiglia :
Gesso di Classe III, MOLDANO®
Gesso di Classe IV, MOLDASTONE®, MOLDASYNT®

Galvanizzazione:

Le impronte possono essere argentate o ramate in bagni galvanici.

Disinfezione:

Le impronte possono essere trattate con una soluzione acquosa di glutaraldeide (2 %) o con altra soluzione disinfettante adatta per elastomeri. Attenersi alle istruzioni della casa produttrice del disinfettante.

Conservazione:

Non tenere a temperatura superiore a 25°C.

Flexitime®	EN 24823	Colore di produzione		Tempo die miscelazione	Tempo di lavorazione totale*	Tempo min. di permanenza in bocca	Tempo di polimerizza- zione	Durezza Shore A	Defor- mazione max. da com- pressione	Memoria elastica	Varia- zione dimen- sionale
		Base	Catalizzatore	s	min : s	min : s	min : s		%	%	%
Easy Putty	Tipo 0 putty	violetto	grigio chiaro	45	2 : 30	2 : 30	3 : 45 - 5 : 00	70	1,8	99,7	0,20
Heavy Tray	Tipo 1 heavy bodied	violetto	grigio chiaro	–	2 : 30	2 : 30	3 : 30 - 5 : 00	72	1,6	99,0	0,18
Mono Phase	Tipo 2 medium bodied	purple	grigio chiaro	–	2 : 30	2 : 30	3 : 30 - 5 : 00	58	2,6	98,8	0,20
Correct Flow	Tipo 3 light bodied	verde chiaro	grigio chiaro	–	2 : 30	2 : 30	3 : 30 - 5 : 00	42	4,6	99,6	0,11

*Riferito a temperatura ambiente 23°C (50 ± 5) % di umidità. Temperature più elevate accorciano i tempi di lavorazione; temperature più basse allungano i tempi di lavorazione.

La nostra consulenza in merito alle tecniche di applicazione sia verbale che scritta che sperimentale si basa sullo stato della scienza, tuttavia vale solo come indicazione non vincolante, anche in riferimento ad eventuali diritti di terzi e non vi esonera dall'effettuare prove in proprio dei prodotti da noi forniti onde appurarne l'idoneità all'uso ed ai processi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei prodotti avviene al di là delle nostre possibilità di controllo e rientra pertanto solo ed esclusivamente nella vostra responsabilità. Garantiamo una qualità ineccepibile dei nostri prodotti in conformità alle nostre Condizioni generali di vendita e di fornitura.

Heraeus Kulzer
D-41538 Dormagen

Distributed in the U.S. exclusively by:
Heraeus Kulzer, Inc.
4315 S. Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614 USA
1-800-343-53366



66002179 -1/ 4.2000