

DRY TIPS blocca la saliva alla fonte




Una volta posizionato, DRY TIPS ricopre le ghiandole salivari. La potente azione capillare del materiale assorbente mantiene DRY TIPS in posizione e consente di mantenere asciutta l'area per più di 15 minuti.

DRY TIPS possiede vantaggi unici

- Eccezionale potere assorbente: 5 volte superiore a quello dei rulli di cotone standard!
- Copertura completa del dotto parotideo e della mucosa orale.
- Non lascia fibre o altri residui all'interno della cavità orale.
- Facilita il lavoro nella parte più profonda della cavità orale.
- Sostituisce efficacemente la diga in molti trattamenti.
- E' molto flessibile e si adatta a tutti i movimenti della guancia.
- Non si sposta e si rimuove facilmente e velocemente; è confortevole per il paziente.

Trova applicazione in: ricostruzioni in composito e amalgama, cementazione di ponti e corone, sigillatura di pozzetti e fessure, trattamenti ortodontici, fluorurazione, molatura di contatti occlusali, tecniche di rivestimento e presa di impronte.

DRY TIPS ha il controllo assoluto del flusso salivare

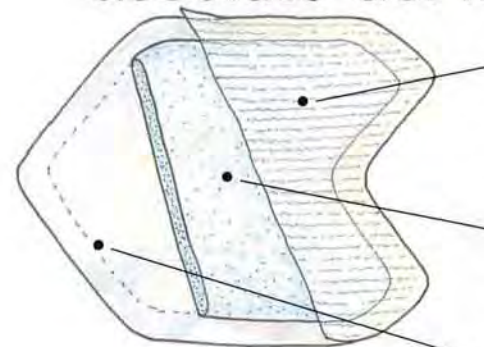

Strato a contatto della mucosa orale

Rivestimento in retina di nylon permeabile alla saliva che aderisce delicatamente alla mucosa.

Strato centrale

Materiale ad alto potere assorbente che si trasforma in gel quando entra in contatto con la saliva.

Strato rivolto verso la cavità orale
Pellicola di polietilene che forma una barriera impermeabile e trasparente ed una protezione contro le ferite.

DRY TIPS assorbe e trattiene una quantità di saliva pari a 30 volte il suo peso.

DRY TIPS è disponibile in 2 misure: Large e Small.

Scegliere la misura di DRY TIPS più adatta e posizionarlo inserendo la punta nel fondo della cavità e tenendo quindi le 2 punte verso l'esterno. La superficie retinata deve essere rivolta verso la mucosa, mentre la pellicola lucida verso la cavità orale. Dopo alcuni secondi si crea un effetto "cerotto" e DRY TIPS resta bloccato in posizione.

DRY TIPS assorbe efficacemente la saliva per più di 15 minuti. In questo modo si tiene sotto controllo l'attività della ghiandola parotidea. Terminato il trattamento è sufficiente irrorare il lato di DRY TIPS verso la mucosa per farlo staccare e quindi eliminarlo.

Provate DRY TIPS

Scoprite i vantaggi unici di DRY TIPS: assorbimento assoluto, protezione sicura, nessuno sfibramento.

DRY TIPS vi permette di lavorare in perfetta tranquillità!