

Punte di siringa ad aria/acqua da gettare Sani-Tip®

INDICAZIONI PER L'USO

Le punte di siringa ad aria/acqua monouso da gettare riducono il potenziale per contaminazione e producono aria e acqua separatamente per un'aria asciutta costante.

CONTRAINDICAZIONI

Non usare negli ambienti di procedure sterili.

AVVERTENZE

- Le punte di siringa Sani-Tip® sono concepite per funzionare esclusivamente con le siringhe ad aria/acqua convertite con il kit di conversione Sani-Tip®. Se il suo sistema non è stato convertito per l'uso delle punte da gettare Sani-Tip®, il kit di conversione Sani-Tip® adatto DEVE essere installato prima dell'uso. Rivolgersi al distributore per una lista completa dei kit di conversione disponibili.
- Per evitare il danno fisico al paziente, o danno all'attrezzatura e/o una disfunzione, usare soltanto i componenti dell'adattatore e le punte Sani-Tip di plastica trasparente prodotte dalla DENTSPLY Professional per il sistema Sani-Tip®.
- SOLO PER USO UNICO. Le punte da gettare non sono autoclavabili. Smaltire dopo l'uso.
- Le punte di siringa Sani-TIP non sono destinate per usare con acqua sterile.

PRECAUZIONI

- Gli utenti delle siringhe ad aria/acqua devono seguire le istruzioni dei fornitori di unità dentali e di siringhe per mantenere la qualità dell'acqua e per minimizzare il biofilm.
- Se installate correttamente, le punte Sani-Tip di siringa ad aria/acqua non contribuiscono alla contaminazione dovuta alla ritrazione della flora orale. Per evitare "l'aspirazione" nel sistema, aggiungere un dispositivo di anti-ritrazione (anti-sifone) in una posizione adatta. Consultare i codici sanitari locali.
- I rischi del riutilizzo possono rappresentare un malfunzionamento delle apparecchiature e la contaminazione incrociata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. ALLENTARE IL DADO A CHIAVE sulla siringa ad aria/acqua.



2. Inserire una nuova punta di siringa Sani-Tip® e SPINGERE nell'adattatore il più distante possibile. Mentre si spinge all'interno, girare la punta di 1/2 rotazione in senso orario per generare un sigillo sull'asse interno affusolato per l'acqua.



EFFETTI INDESIDERATI

Nessuna nota.

ANALISI GUASTI

PROBLEMA: Perdite di acqua, aria umida e/o punte allentate.

Indicano:

- a) Il foro centrale della punta di siringa Sani-Tip® non è completamente alloggiato sull'asse per l'acqua all'interno del nuovo adattatore, o
- b) Il kit di conversione Sani-Tip® corretto non è installato correttamente, e/o mancano parti; il dado a chiave non è stretto completamente; o punte sbagliate sono usate.
- c) L'asse interno per l'acqua è danneggiato.

SOLUZIONE:

- a) ALLENTARE IL DADO A CHIAVE, quando si scambia punte da gettare Sani-Tip®. Inserire una nuova punta e SPINGERE nell'adattatore il più distante possibile. Mentre si spinge all'interno, girare la punta di 1/2 rotazione in senso orario per generare un sigillo sull'asse interno affusolato per l'acqua. Stringere il dado a chiave.
- b) Assicursi che il kit di conversione corretto Sani-Tip® sia correttamente installato. Confermare la presenza del cono di plastica e di tutti gli anelli di guarnizione o-ring. Stringere fortemente il dado a chiave dopo aver inserito la nuova punta. Verificare che le punte siano punte di plastica trasparente prodotte dalla DENTSPLY Professional per il sistema Sani-Tip®.
- c) Se l'asse per l'acqua all'interno dell'adattatore Sani-Tip® è danneggiato, sostituire l'adattatore.

PROBLEMA: La punta non si adatta con il dado a chiave

SOLUZIONE: Allentare il dado a chiave di un giro completo per espandere l'apertura del cono di plastica.

PROBLEMA: Poca o niente acqua.

SOLUZIONE: Controllare che l'asse per l'acqua non sia bloccato o danneggiato all'interno dell'adattatore, o che l'uscita per l'acqua non sia ostruita nella testa della siringa.

PROBLEMA: Troppa/poca pressione dell'acqua o dell'aria.

SOLUZIONE: Piccole regolazioni alla pressione dell'acqua e dell'aria possono essere fatte sull'unità dentale. Seguire le specifiche del fabbricante.

ESAMINARE PRIMA DI OGNI USO.

3. Stringere a mano il dado a chiave. Per riorientare la punta, spingere sulla punta mentre si ruota in senso orario.



4. Esaminare prima di ogni uso: Fare fuoriuscire acqua, poi fare fuoriuscire soltanto aria. Se l'aria contiene umidità, o la punta si sloggia, riferirsi alla sezione Analisi guasti delle direzioni per l'uso del kit di conversione.

5. Per sostituire la punta, ALLENTARE IL DADO A CHIAVE. Rimuovere e scartare la punta usata. Ripetere i punti 2 e 3.