

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte del personale odontoiatrico qualificato, limitatamente alla gamma di istruzioni sotto riportata.

INDICAZIONI

- 1. Cementazione di corone in metallo e metallo-ceramica, ponti, inlay.
- 2. Cementazion e di corone in acciaio o apparecchi ortodontici sostenuti da corone in acciaio.
- 3. cementazione di bande ortodontiche.
- 4. Base o sottofondo.

CONTROINDICAZIONI

- 1. Incappucciamento pulpare.
- 2. In rari casi il prodotto può causare reazioni di sensibilizzazione in alcune persone. Se si verifica questa reazione, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO

Rapporto polvere/liquido (g/g)	1.4/1.0	1.8/1.0	2.2/1.0
Tempo di miscelazione (min. sec.)	20"	20"	20"
Tempo di lavorazione (min. sec.)	2'30"	2'00"	1'15"
Tempo di indurimento netto (min. sec.)	2'50"	2'30"	2'20"

Condizioni per il test: temperatura (23+/-1°C) Umidità relativa (50+/-10%)
ISO 9917 : 1991 (E) (Cementi per uso dentale a base di acqua)

1. DISTRIBUZIONE DI POLVERE E LIQUIDO

- a) Il rapporto standard polvere/liquido è pari a 1,8/1,0g. 1 misurino raso di polvere con 2 gocce di liquido.
- b) Per una corretta distribuzione della polvere, dare leggeri colpi al flacone con la mano. Non agitare, né rovesciare il contenitore.
- c) Tenere il flacone del liquido in posizione verticale e schiacciare delicatamente.
- d) Chiudere i flaconi subito dopo l'uso.

2. MISCELAZIONE

Versare polvere e liquido sull'apposito blocchetto. Con la spatola di plastica, aggiungere tutta la polvere al liquido. Miscelare rapidamente per 20 secondi.
Nota : Per quantità superiori, suddividere la polvere in due parti uguali. Miscelare la prima porzione con l'intera quantità di liquido per 5 secondi. Incorporare la polvere rimanente e miscelare accuratamente il tutto per 10-15 secondi (totale 20 secondi).

3. TECNICA DI CEMENTAZIONE

- a) Preparare il dente seguendo le tecniche convenzionali. Utilizzare un cemento all'idrossido di calcio per l'incappucciamento pulpare.
- b) Lavare solo con pomice e acqua. Lavare e asciugare, SENZA DISIDRATARE. NON ASPORTARE IL FANGO DENTINALE.
- c) Pulire e asciugare la parte interna delle fusioni o delle corone in acciaio.
- d) Miscelare la quantità di cemento richiesta.
- e)
 - (i) Cementazione di corone metalliche fuse o ponti
Rivestire la superficie interna della ricostruzione con uno spessore di cemento di 1 mm. e iniziare a mettere in situ 30 secondi dopo aver completato la miscelazione. (NON RIEMPIRE TROPPO).
Temperature più alte diminuiscono il tempo di lavorazione.
 - (ii) Cementazione di corone in acciaio
Riempire la corona con il cemento e posizionare.
Nota : per facilitare la rimozione degli apparecchi ortodontici ,ricoprire le superfici occlusali dei denti da cementare con un gel fluorurato o con vaselina prima della cementazione.
- f) Il tempo d'indurimento è di 4 minuti e 30 secondi dall'inizio della miscelazione. Rimuovere gli eccessi di cemento appena raggiunge la consistenza di gel.

CONSERVAZIONE

Conservare alla temperatura di 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Durata utile : 3 anni)

COLORE

Giallo chiaro.

CONFEZIONI

- 1. Confezione 1-1: 35g polvere, 25g (20mL) liquido, misurino per polvere, blocchetti di miscelazione (n. 20)
- 2. Flacone da 35g polvere con misurino
- 3. Flacone da 25g (20mL) liquido.

AVVERTENZE

- 1. In caso di contatto con il tessuto orale o con la pelle, eliminare immediatamente il prodotto con una spugna o con cotone idrofilo imbevuto d'alcol. Sciacquare con acqua.
- 2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.
- 3. NON miscelare polvere o liquido con altri componenti vetroionomerici.



MANUFACTURED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC EUROPE N.V.
Research-Park, 13 Interleuvenlaan, B-3001 Leuven, Belgium

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724

PRINTED IN JAPAN

