

D.T. LIGHT-POST® X-RO™ ILLUSION™



For better dentistry

DENTSPLY
ITALIA



Le frese D.T. Universal Drill e D.T. Finishing Drill vengono fornite non sterili. Disinfettare e sterilizzare gli strumenti prima di ciascun utilizzo. Disinfettare gli strumenti con agenti pulenti o disinfettanti adatti agli strumenti rotanti e seguire le istruzioni del produttore. Non disinfettare in termodisinfettori. Controllare visivamente le frese prima di ciascun utilizzo: sostituirli quando risultano danneggiati, corrosi o spuntati.

SICUREZZA E RESPONSABILITA'

Dentsply declina qualunque responsabilità o penalità per eventuali danni dovuti a:

- utilizzo di strumenti che non appartengono al sistema e che possono alterare il funzionamento.
- non osservanza delle istruzioni d'uso.

L'utilizzatore è responsabile del controllo dell'idoneità del materiale e dell'utilizzo per qualunque scopo non indicato esplicitamente nelle istruzioni d'uso. Ad esclusivo uso odontoiatrico.

È disponibile un kit per il ritrattamento dei pemi D.T.

Produttore:
RTD
3 rue Louis Neel
38120 St Egrève France
www.rtd.fr - rtd@rtd.fr

Distributore:
DENTSPLY Italia s.r.l.
Via Curtatone, 3
00185 Roma
N° Verde 800 921107



- 2009 -

ITA Rev. 10/09

**** Fare riferimento alle istruzioni d'uso del produttore.***