

pro • glider™



per un glide path
semplice e veloce

+
WE
KNOW
ENDO.





È necessario un solo file rotante per glide path


Un'importante fase della procedura endodontica è la creazione di un glide path, con l'obiettivo di assicurare il percorso nel canale radicolare prima dell'utilizzo del sistema per la sagomatura. Tradizionalmente questa parte della procedura veniva eseguita con strumenti manuali, però PROGLIDER™ offre diversi vantaggi rispetto ai file manuali per glide path:

- **un solo file PROGLIDER™ è sufficiente** per creare un glide path che rispetti l'anatomia radicolare e permetta al clinico di lavorare più velocemente rispetto all'uso di strumenti manuali o di soluzioni rotanti alternative per glide path.
- **PROGLIDER™ è adatto alla maggior parte dei canali radicolari**, compresi quelli particolarmente curvi.
- **PROGLIDER™ preserva maggiormente l'anatomia canalare** rispetto agli strumenti manuali per glide path.

PROGLIDER™ è il sistema meccanico in NiTi per glide path d'elezione per tutti i clinici che utilizzano qualunque sistema per sagomatura e che desiderano la soluzione per glide path più avanzata in termini di efficienza, semplicità e sicurezza.

Meno **tempo** per il glide path

40% di tempo in meno necessario per creare un glide path con PROGLIDER™ rispetto all'utilizzo di strumenti manuali in acciaio per glide path.

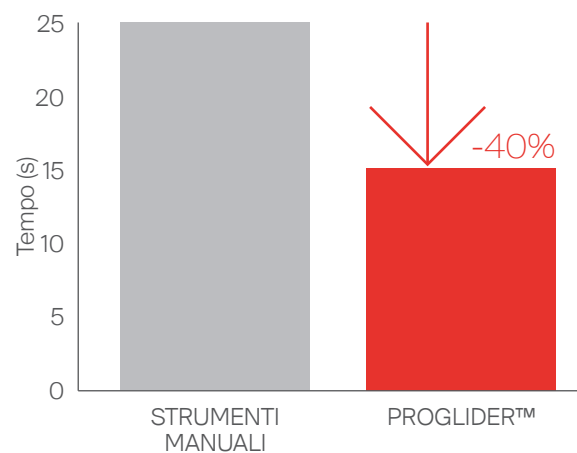

Rispetto dell'anatomia radicolare



Prevalenza di aberrazioni nel canale (zip, gradini e trasporto del canale). Nel gruppo PROGLIDER™ (a sinistra) vi sono significativamente meno aberrazioni rispetto al gruppo degli strumenti in acciaio (a destra), Berutti et al. 2013.



scegliete la vostra

pro • glider™
+
wave • one®

efficienza e semplicità **in perfetta armonia**

PROGLIDER™ migliora la semplicità della soluzione WAVEONE®: un solo strumento meccanico per il glide path prima del singolo strumento WAVEONE® per la sagomatura.



soluzione endo

pro • glider™
+
PROTAPER • NEXT™

facilità e **flessibilità** in un'unica combinazione

PROGLIDER™ è adatto alla maggior parte dei canali radicolari, compresi quelli particolarmente curvi, nel pieno rispetto della loro anatomia.

È quindi un'eccellente scelta in combinazione con PROTAPER NEXT™.

Entra nel mondo degli standard medicali più elevati

Dentsply Maillefer assicura il rispetto degli standard medicali confezionando i file PROGLIDER™ esclusivamente in blister pre-sterilizzati monouso. Questo fornisce diversi vantaggi:

Ergonomia

Non è necessario riprocessare e riorganizzare i file in NiTi PROGLIDER™.



Rischio ridotto di rottura del file

I file endodontici mostrano segni di usura durante il normale utilizzo. Sono soggetti anche alla fatica ciclica, che è la causa principale di rottura dello strumento durante il trattamento del paziente. Il monouso, quindi, riduce il rischio di rottura aumentando così la sicurezza del paziente.



Ottimale efficienza di taglio

La ricerca ha dimostrato che l'uso multiplo dei file endodontici riduce effettivamente la loro efficienza di taglio, influenzando negativamente la soddisfazione sia del clinico che del paziente. Con PROGLIDER™ non vi è riduzione dell'efficienza di taglio, in quanto per ogni paziente si utilizza uno strumento nuovo.



Nessun rischio di contaminazione crociata

Indipendentemente da quanto bene sia stato sterilizzato uno strumento, la ricerca dimostra che sullo strumento possono rimanere alcuni batteri e residui di tessuto. Il ripetuto utilizzo di questi strumenti aumenta quindi il rischio di contaminazione crociata per ogni paziente successivo.

Principali caratteristiche del prodotto



- Realizzazione in lega di NiTi M-WIRE® che assicura flessibilità ed elevata resistenza contro la fatica ciclica.



- Dimensione della punta 16 .02, con una conicità progressiva variabile.

- Rotazione continua a 300 rpm / 2Ncm, regolabile fino a 5.2Ncm in base all'esperienza del clinico.

BLISTER DA 6 FILE

A092622100103 File PROGLIDER Sterile 21mm 016 .02 21mm blister da 6 file

A092622500103 File PROGLIDER Sterile 25mm 016 .02 25mm blister da 6 file

A092623100103 File PROGLIDER Sterile 31mm 016 .02 31mm blister da 6 file

BLISTER DA 3 FILE

A092322100103 File PROGLIDER Sterile 21mm 016 .02 21mm blister da 3 file

A092322500103 File PROGLIDER Sterile 25mm 016 .02 25mm blister da 3 file

A092323100103 File PROGLIDER Sterile 31mm 016 .02 31mm blister da 3 file



MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l.
CHEMIN DU VERGER 3
CH-1338 BALLAIGUES
SWITZERLAND

www.dentsplymailefer.com



I - 46100 MANTOVA ITALY
VIA PISACANE, 5/A
Tel. (0376) 267.811 ra.
Fax (0376) 381.261

e-mail: info@simitdental.it
www.simitdental.it

