

LA MIA
SCELTA ITENA
#cementazione
definitiva

TOTALCEM

AUTOMIX / DUAL CURE

Cemento composito autoadesivo **speciale per metalli**



Cementazione definitiva di corone, ponti, inlay, onlay e perni. Autoadesivo su smalto, dentina e metallo.

- **Tutto in uno:** mordenzante + legante + cemento
- **Auto/foto-polimerizzabile**
- Polimerizzazione garantita anche nelle zone dove non arriva la luce
- Le eccedenze sono facilmente rimovibili dopo un flash di foto-polimerizzazione da 3 a 4 s che le rende elastiche
- **Assenza totale di sensibilità post-operatoria**
- Tempo di lavorazione più lungo rispetto a CVIMAR (cementi vetroionomerici modificati con resina)
- **Non solubile nei fluidi della cavità orale**
- Impermeabilità immediata ed eccellente nel tempo
- Utilizzabile su denti vivi
- Stabilità del colore a lungo termine
- Conservare in luogo fresco dopo l'apertura

Disponibile in 2 tonalità:



A2 Universale



Traslucida

Cementazione su metallo

**ADESIONE
DEBOLE
MECCANICA**

**PREPARAZIONE DELL'ELEMENTO
PROTESICO**
Sabbiatura elettrochimica +
Primer + Cemento

**Prodotto per sabbiatura +
IPERBOND MAX + DENTOCEM**

PREPARAZIONE DEL DENTE
Etching + Primer + Legante
QUICKBOND O IPERBOND MAX

**ADESIONE
MEDIA
MECCANICA**

**PREPARAZIONE DELL'ELEMENTO
PROTESICO**
Primer + Cemento

**IPERBOND MAX +
DENTOCEM O TOTALCEM**

PREPARAZIONE DEL DENTE
Etching + Primer + Legante
QUICKBOND O IPERBOND MAX

**ADESIONE
FORTE
MECCANICA**



**PREPARAZIONE DELL'ELEMENTO
PROTESICO**
Cemento

TOTALCEM

PREPARAZIONE DEL DENTE
Nessuna preparazione del legante

Dati tecnici

Resistenza alla compressione: 180 MPa
 Coefficiente di assorbimento: 12 µg/mm³
 Solubilità: 7 µg/mm³
 Spessore del film: 10 µm
 Radiopacità, % Alluminio: 250
 Rilascio di fluoro (cumulativo su 14 giorni): 589 ppm
 Tempo di lavoro: da 1,5 a 3,5 min
 Tempo di presa (temperatura orale): da 2,5 a 4,5 min
 Compatibile con tutte le lampade: Sì

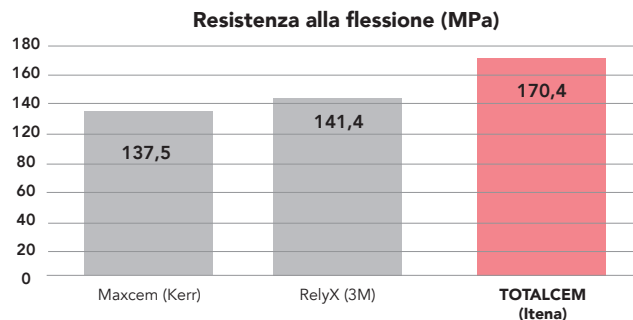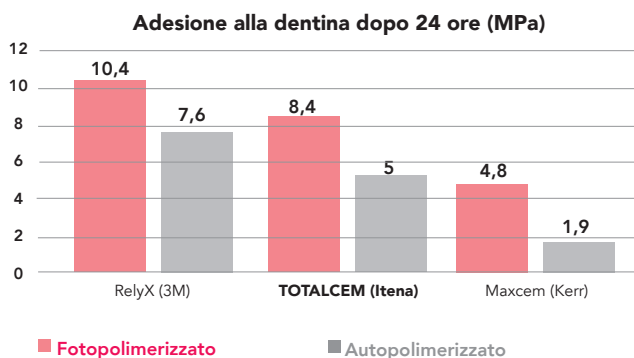

Riferimenti

TOTALCEM traslucido

Siringa 8 g + 10 puntali miscelatori + 10 beccucci intra-orali fini + 10 beccucci intra-orali extra fini TTLCEM-TR

TOTALCEM A2 Universale

Siringa 8 g + 10 puntali miscelatori + 10 beccucci intra-orali fini + 10 beccucci intra-orali extra fini TTLCEM- A2

TOTALCEM traslucido - Value Pack

3 siringhe traslucide 8 g + 30 puntali miscelatori + 30 beccucci intra-orali fini + 30 beccucci intra-orali extra fini TCEM3- VPTR

TOTALCEM A2 - Value Pack

3 siringhe A2 8 g + 30 puntali miscelatori + 30 beccucci intra-orali fini + 30 beccucci intra-orali extra fini TCEM3-VPA2

Visita il sito www.itena-clinical.com

