

3M Science.
Applied to Life.™

Più veloce. Molto resistente.

Ketac™

Universal Aplicap™

Vetroionomero da restauro



Ketac™ Universal Aplicap™

Vetroionomero da restauro

Veloce

Perché i pazienti soggetti a carie possono essere anche quelli più dinamici.

Bambini. Anziani. E giovani sempre impegnati. Il trattamento di pazienti che non possono restare seduti a lungo diventa una corsa contro il tempo - e ogni secondo è importante. Ecco perché 3M ha messo a punto Ketac™ Universal Aplicap™.

Poco appiccicoso e facilmente lavorabile, riduce il tempo alla poltrona grazie al semplice posizionamento del materiale in un solo passaggio... per un trattamento in tempi più rapidi.



Basta applicare, modellare... ed è subito fatto.

Con Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative non sono necessarie le fasi di condizionamento, ulteriore rivestimento e fotopolimerizzazione che rallentano la procedura.

Meno passaggi = procedura semplice e più rapida

Principali vantaggi

- Non necessita condizionamento o ulteriori rivestimenti di superficie
- Posizionamento in massa - non necessita stratificazione
- Permette restauri veloci, in un'unica fase, resistenti alla masticazione
- Indicazioni d'uso più estese rispetto ad altri materiali vetroionomeri
- Bassa appiccicosità, permette una facile applicazione
- Rilascio di fluoro continuo per 24 mesi
- Auto-adesivo
- Autopolimerizzante
- Disponibile in 6 colori
- Radiopaco

Passaggi dopo la preparazione di cavità*	Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative	GC Fuji IX GP®	EQUIA™ FIL
	solo 4 passaggi	13 passaggi	13 passaggi
Condizionamento della cavità		●	●
Risciacquo		●	●
Asciugatura con aria		●	●
Scuotimento della capsula		●	●
Attivazione della capsula	●	●	●
Condizionamento della capsula		●	●
Miscelazione della capsula (nel miscelatore)	●	●	●
Applicazione in massa	●	●	●
Rivestimento		●	●
Fotopolimerizzazione/ asciugatura con aria		●	●
Finitura	●	●	●
Rivestimento		●	●
Fotopolimerizzazione/ asciugatura con aria		●	●



Passaggi clinici in base alle istruzioni d'uso del produttore.

Resistente

Sufficientemente resistente per restauri a lungo termine e sottoposti a masticazione.¹

Una procedura più rapida e semplice è l'ideale - ma è anche necessario che la riduzione dei tempi non comprometta le prestazioni.

Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative permette di risparmiare tempo eliminando la necessità di ulteriore rivestimento - ma assicura comunque una resistenza alla compressione e una durezza di superficie superiori a quelle di diversi vetroionomeri concorrenti che necessitano di rivestimento.¹ Questo risultato è uno dei più innovativi nella trentennale esperienza di 3M nello sviluppo di comprovati vetroionomeri.

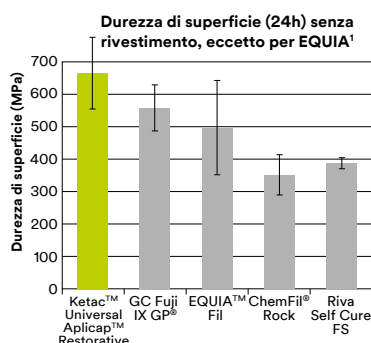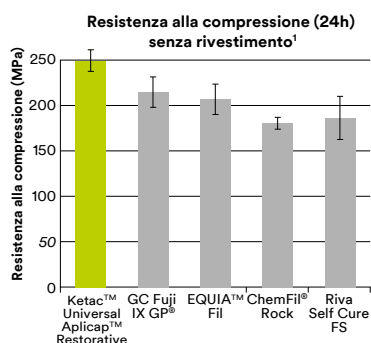

Lavorabilità


La bassa appiccicosità facilita l'applicazione.

Un vantaggio che Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative offre rispetto ad altri materiali è che aderisce alla cavità durante l'applicazione, ma non si appiccica agli strumenti - è quindi facile da applicare e modellare. Come prova di ciò, è stato eseguito un test di laboratorio.

Un condensatore a pallina in metallo è stato immerso nella pasta miscelata di ciascun materiale da restauro e recuperato immediatamente.

Le foto del test provano che Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative non aderisca alla pallina

in metallo, mentre gli altri vetroionomeri mostrano chiaramente un residuo di materiale - ovvero appiccicosità - al sollevamento dello strumento.¹

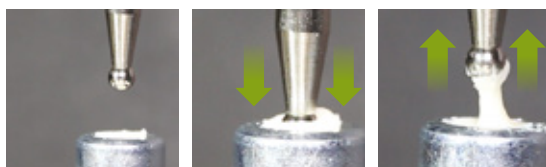

I condensatori sono stati immersi nella pasta miscelata e recuperati immediatamente.




Ketac™ Universal Aplicap™ Glass Ionomer Restorative



GC Fuji IX GP® Caps



EQUIA™ Fil Caps

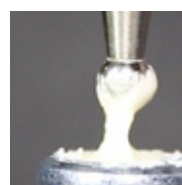

Riva Self Cure Caps

Percentuali di soddisfazione dei dentisti

In un test pratico, sono state eseguite 956 otturazioni con Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative. I dentisti hanno apprezzato il risparmio di tempo, la lavorabilità globale, la facilità di applicazione e adattamento alla cavità.¹

94%

hanno verificato che permette una facile applicazione in un solo passaggio



84%

concordano che il NUOVO design dell'applicatore migliora l'accesso alle cavità profonde



75%

ha affermato che



la bassa appiccicosità allo strumento facilita l'applicazione

1. Fonte: riferirsi alla Scheda tecnica.

Ketac™ Universal Aplicap™

Vetroionomero da restauro

L'ampia gamma di indicazioni lo rende una soluzione universale per il vostro studio.

- Rivestimento di cavità per otturazioni in composito a una o più superfici
- Ricostruzione di moncone prima dell'applicazione della corona
- Otturazione di denti decidui
- Restauri di I e II Classe in casi selezionati*
- Otturazioni cervicali
- Otturazioni provvisorie a una o più superfici
- Sigillo di fessure



Situazione iniziale



Preparazione



Applicazione in massa



Situazione finale

Le avanzate proprietà meccaniche di Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative permettono di ampliare le indicazioni, includendo i restauri di I e II classe ristretti in casi selezionati.

Immagini a cura del Dr. Jacqueline Esch.

*Per maggiori informazioni, riferirsi alle istruzioni d'uso.

Informazioni per l'ordine

Versione Aplicap



Codice	Informazioni sul prodotto
Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative - Ricambi	
61085	50 Capsule, colore White, A2, A3
61086	50 Capsule, colore White
61087	50 Capsule, colore A1
61088	50 Capsule, colore A2
61089	50 Capsule, colore A3
61095	50 Capsule, colore A3.5
61096	50 Capsule, colore A4
61097	Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative Giant Pack A3 Include: 300 capsule Aplicap
73040	Attivatore Aplicap™
73050	Applicatore Aplicap™
76300	Miscelatore per capsule Rotomix™

Versione Polvere & Liquido



Codice	Informazioni sul prodotto
Ketac™ Universal Polvere e Liquido - Ricambi	
61111	Ketac Universal Handmix Liquido 8,5 ml
61105	Ketac Universal Handmix Polvere 12,5g Colore WHITE
61106	Ketac Universal Handmix Polvere 12,5g Colore A1
61107	Ketac Universal Handmix Polvere 12,5g Colore A2
61108	Ketac Universal Handmix Polvere 12,5g Colore A3
61109	Ketac Universal Handmix Polvere 12,5g Colore A3,5
61110	Ketac Universal Handmix Polvere 12,5g Colore A4
Ketac™ Universal Polvere e Liquido - Kit	
61104	Ketac Universal Polvere/Liquido KIT A3. Contiene: 1 confezione di Polvere 12,5g A3 ; 1 confezione di liquido da 8,5ml, 1 blocchetto per miscelazione, 1 cucchiaino.



3M Oral Care
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pogliano (MI)

Tel. 02 7035.3537
www.3mespe.it

I Prodotti della linea Ketac™ sono Dispositivi Medici marcati CE.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario

3M, Aplicap, Rotomix e Ketac sono marchi di fabbrica di 3M o 3M ESPE Deutschland GmbH. Usati con licenza in Canada. © 3M 2016. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi di fabbrica non sono di proprietà di 3M.