



**Lo sbiancamento
dentale
diventa per tutti**

BLANCONE[®]

**Sbiancamento professionale
di cosmesi dentale**

BlancOne®: Un nuovo paradigma nello sbiancamento dentale


I trattamenti BlancOne® sono il frutto di una **ricerca quindicennale** che ha portato ad un **nuovo approccio** allo sbiancamento dentale, basato sullo sviluppo di **nuove tecnologie fotochimiche**.

E' stato ampiamente dimostrato che la luce emessa dalle lampade sbiancanti non migliora l'efficacia dei perossidi utilizzati nello sbiancamento dentale, se non al limite, accelerando leggermente la reazione per via del calore trasmesso al gel.

Invece **i gel fotochimici BlancOne®** includono **due speciali componenti**, oltre al perossido, in grado di scinderlo con **una velocità ed un'efficacia impossibile con le reazioni chimiche dei sistemi sbiancanti tradizionali**.


- **FOTO SENSIBILIZZATORI**, speciali coloranti che **sfruttano i fotoni** emessi da una lampada a specifiche lunghezze d'onda e **raggiungono uno stato elettronico "eccitato"** che trasmette una forte energia a tutto il sistema.
- **CATALIZZATORI** che sintetizzano questa grande energia e **innescano una serie di reazioni a catena** che iper accelera la scissione dei perossidi.

Questo **"dirompente" meccanismo energetico** è in grado di sviluppare in pochi minuti **un tipo diverso di ossigeno: l'OSSIGENO SINGOLETTO**, un forma atomica di ossigeno non radicale, in grado di svolgere **un'azione ossidante molto più veloce, profonda e sicura** rispetto ai radicali liberi (ROS) prodotti dai tradizionali sistemi sbiancanti.

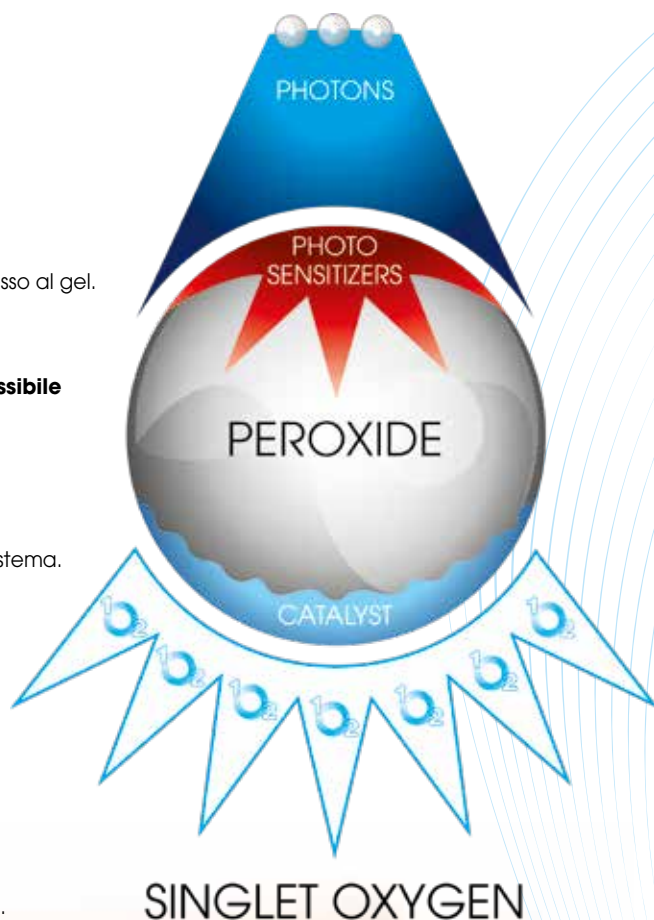

BlancOne® CLICK: il trattamento che cambierà per sempre la vostra pratica

L'innovativa tecnologia BlancOne® ha consentito lo sviluppo di BlancOne® CLICK, un rivoluzionario ed unico trattamento sbiancante veloce, abbinabile alla seduta di igiene dentale.

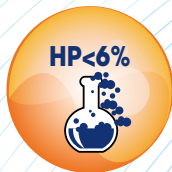

Efficace a basse concentrazioni

Per la prima volta abbiamo reso efficace lo sbiancamento in studio a bassa concentrazione di perossido d'idrogeno (<6%), a norma con la Direttiva Europea 84/2011, la più avanzata regolamentazione la tutela della sicurezza dei consumatori.



Senza protezione gengivale

Abbiamo creato **gli unici sbiancamenti in studio che non necessitano la protezione delle mucose**, eliminando il passaggio più delicato della **procedura** che può essere **eseguita da chiunque in modo semplice e sicuro**.



Agisce in soli 10 minuti

Grazie alla tecnologia fotochimica BlancOne®, la scissione del perossido di carbamide al 16%, che normalmente richiede ore, viene iper accelerata in pochi minuti.

Il trattamento è molto più veloce e confortevole e può essere abbinato alla seduta d'igiene dentale.



Senza dolore e sensibilità

Con tempi di azione rapidissimi, tutti i trattamenti in studio BlancOne® **non aggrediscono ne disidratano lo smalto, non inducono dolore ne sensibilità**, infatti sono gli unici sul mercato che privi di agenti desensibilizzanti e remineralizzanti.



Accessibile e ripetibile

Con sedute veloci e costo molto contenuto, BlancOne® CLICK può essere proposto ad un **prezzo accessibile a tutti**. Ideale per avvicinare allo sbiancamento, **può essere ripetuto frequentemente** e introdurre a trattamenti più intensivi.



Tutto comincia con un **CLICK**

Con un **miglioramento tipico di 4-5 toni di bianco***,
un costo al paziente di **poche decine di euro**
e una confortevole **seduta di pochi minuti**,
BlancOne® CLICK è un **trattamento di nuova concezione**,
il **punto di partenza IDEALE** pensato per consentire a tutti
di sperimentare l'esperienza di un sorriso immediatamente più bianco e luminoso

- ✓ **IDEALE** trattamento per **avvicinare lo sbiancamento**
- ✓ **IDEALE** per chi dispone di un **budget ridotto**
- ✓ **IDEALE** **completamento di ogni seduta di igiene dentale**
- ✓ **IDEALE** per il **marketing promozionale dello studio**

Con oltre 100.000 trattamenti svolti nell'ultimo anno soltanto in Italia
e un indice di soddisfazione paziente di 4,5 su 5,
BlancOne® CLICK si è già affermato
come **la scelta n.1 di dentisti e pazienti!**

* Toni misurati con la scala colori Vita Classic riorganizzata per lo sbiancamento.
Dati raccolti attraverso 10.956 casi registrati con la app BlancOne PRO.



Ora per la prima
volta puoi regalare
**la gratificazione
di un nuovo sorriso,**
più bianco e
luminoso
**ad ogni seduta
di igiene dentale.**

L'igiene dentale è una pratica quotidiana nello studio dentale,
i tuoi pazienti hanno l'aspettativa che la seduta d'igiene renda i loro denti
anche più bianchi; ecco perché l'igiene dentale è proprio il momento
perfetto per soddisfare questo desiderio.



Come ottenere il massimo per il sorriso di tuoi pazienti

Dopo aver sorpreso i tuoi pazienti con BlancOne® CLICK potrai spiegargli come **ottenere un risultato ancora più eclatante e durevole nel tempo.**

In base alla loro preferenze, compliance e budget potrai proporgli diverse 4 strategie:

CLICK

Ripeti

il trattamento CLICK ogni 3-6 mesi

BlancOne® CLICK è un trattamento **ultra delicato**,
ha un **costo alla portata di tutti**
e **può quindi essere ripetuto frequentemente.**
ideale compagno di ogni vostra seduta di igiene dentale.



TOUCH

Potenzia

il risultato con il trattamento intensivo TOUCH

BlancOne® TOUCH è la **versione intensiva del CLICK**
basata su più applicazioni nella stessa seduta.
Uno sbiancamento delicato ed efficace
che è in grado di produrre **un bianco più profondo e durevole.**



HOME

Combina

col trattamento domiciliare HOME

Attraverso l'uso di mascherine domiciliari,
potete combinare **l'immediatezza del CLICK**
con la durevolezza di BlancOne® HOME.
HOME è disponibile **in due versioni DAY (2 ore) e NIGHT (notturno).**



XTRA

Mantieni

attraverso il nostro programma XTRA

BlancOne® XTRA può essere abbinato a qualsiasi trattamento in studio
per prolungarne efficacia e stabilità attraverso
l'**azione sinergica di due trattamenti:**

- I gel dentifrici **DUETTO ACTIVE** e **DUETTO CARE**
- La penna sbiancante **BlancOne® STICK**

Il programma di mantenimento BlancOne® XTRA
dura 3 mesi e può essere ripetuto.



ULTRA+

Treatmento medicale delle discromie dentali

Per i casi più difficili ed i pazienti più esigenti
la gamma BlancOne® include ULTRA,
un **trattamento medicale ad attivazione fotochimica,**
con perossido di idrogeno al 29%.

Adatto ad **affrontare le discromie più gravi**, come le macchie da tetraciclina,
ULTRA richiede la protezione gengivale e permette fino a 6 cicli
nella medesima seduta per raggiungere risultati davvero sorprendenti.



*BlancOne® ULTRA è uno sbiancamento medicale (Direttiva 93/42/CEE).
L'utilizzo può essere limitato dalle normative locali in alcuni paesi della EU.*

IN STUDIO

A CASA

Lampada foto attivante **BlancOne® ARCUS**

L'innovazione tecnologica di BlancOne® è resa possibile anche dall'esclusiva lampada BlancOne® ARCUS che **offre molti vantaggi:**

- I **trattamenti BlancOne®** sono stati ottimizzati per performare al top con la lampada **BlancOne® Arcus**.
- 10 potenti led da 5 watt assicurano la **massima efficacia e rapidità nei tempi indicati** dai protocolli BlancOne®.
- L'arco esteso e la disposizione dei led anche alle sue estremità assicurano la **completa attivazione del gel su tutta l'arcata, laterali compresi**.

BlancOne® ARCUS è disponibile in due versioni: mobile su ruote e fissa con attacco per palo del riunito.



App BlancOne® PRO: un potente strumento **che evolve la professionalità di ogni tuo trattamento**

- In modo semplice e veloce potrai **registrare ogni paziente**** e le abitudini che possono limitare l'efficacia del trattamento.
- **Potrai mostrare, in modo veloce e attrattivo**, quanto è possibile **migliorare il tono di bianco** dei denti.
- Attraverso foto prima e dopo, **potrai immediatamente mostrare il risultato del trattamento effettuato**.
- Alla fine del trattamento, **l'app ti indicherà quando programmare una visita di controllo**.
- **La app ricorderà al paziente**, con una mail automatica, **quando tornare per il check-up del suo sorriso**.
- **Ogni paziente avrà una sua area riservata online** con i dati e le foto dei suoi trattamenti.



La app è gratuita e il tuo studio accresce in valore con ogni trattamento BlancOne®, infatti ogni volta che esegui un trattamento, scansionando con l'App il codice inserito in ogni kit BlancOne®:

- Guadagni **crediti per ricevere gratis i materiali promozionali** per il tuo studio
- Dai **maggiore visibilità al tuo studio** sul sito pubblico blancone.eu
- **Fidelizzi i tuoi pazienti** aumentando la ripetizione dei trattamenti



**I dati raccolti attraverso la app BlancOne PRO sono gestiti in accordo alla normativa europea GDPR per la tutela dei dati personali.

Diventa Centro BlancOne®

l'eccellenza dello sbiancamento dentale

Per i pazienti BlancOne® non è solo sinonimo di trattamenti innovativi e sicuri, ma anche garanzia che questi siano svolti in un **centro qualificato**, come previsto dalla Direttiva Europea sullo sbiancamento dentale. I Centri BlancOne® sono studi dentali specializzati nello sbiancamento e dotati dei più **innovativi trattamenti e strumenti** per garantire ad ogni paziente **un'esperienza di grande soddisfazione**.

Oltre alla app BlancOne® PRO i Centri BlancOne® dispongono di molti vantaggi:

- **Strumenti di marketing** per aiutarti nella promozione dei trattamenti sbiancanti.
- **Area riservata** con strumenti utili per lo sviluppo del tuo Centro.
- **Promozioni dedicate ai pazienti**, programmi di fidelizzazione White for Life e l'iniziativa Open Day.
- **Canali social e web** a cui puoi collegarti per ricevere tanti nuovi pazienti.
- **Mappa dei Centri autorizzati BlancOne®** per permettere a nuovi pazienti di trovarti.

Come centro Autorizzato BlancOne® avrai a disposizione gli strumenti di comunicazione più adatti **per aiutarti a promuovere i trattamenti di sbiancamento**.

Puoi ricevere tutti materiali di marketing e merchandising gratuitamente attraverso i crediti ottenuti utilizzando la App BlancOne® PRO.



Nuovi pazienti Ti stanno cercando...

Diventare Centro BlancOne® è facile e gratuito.
Registrati nell'area professionale online o scaricando la app BlancOne® PRO.



Portfolio

Trattamenti Sbiancanti

		Tipologia Trattamenti	Principio Attivo	Protocollo	Efficacia Tipica	Frequenza Consigliata
IN STUDIO	Sbiancamento veloce		In studio Veloce	Perossido di Carbamide 16% (HP 5,6%)	1 Ciclo da 10 minuti*	4/5 tonalità 4/6 volte all'anno
	Sbiancamento intensivo		In studio Cosmetico	Perossido di Carbamide 16% (HP 5,6%)	3 Cicli da 8 minuti*	6/7 tonalità 1/2 volte all'anno
			In studio Medicale	Perossido di Idrogeno 29%	4-6 Cicli da 8 minuti*	Fino a 10 tonalità 1 volta ogni 1/2 anni
A CASA			Domiciliare Diurno	Perossido di Carbamide 16% (HP 5,6%)	2-3 ore al giorno per 1/2 settimane	1 settimana 4/5 tonalità 1 settimana 2/4 volte all'anno
			Domiciliare Notturmo	Perossido di Carbamide 10% (HP 3,5%)	Tutta la notte per 1/2 settimane	2 settimane 6/7 tonalità 2 settimane 1/2 volte all'anno
	Mantenimento		Programma Mantenimento 3 mesi	Perossido di Carbamide 16% (HP 5,6%)	Stick: per 4 settimane** Duetto: uso quotidiano	1/2 tonalità 2/4 volte all'anno

* foto attivazione con lampada da Sbiancamento BlancOne® Arcus

** 2 settimane iniziali il primo mese + 1 settimana mensile nei mesi successivi

BLANCONE®

www.blancone.eu/pro
helpdesk@blancone.eu



IDS Spa

Via San Cristoforo, 28/10
 17100 Savona - Italia

Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865

email: info@idsdental.it

www.idsdental.it

BlancOne è un marchio registrato di IDS Spa

Rev 3 - 15/1/20