

Strumenti per rifinitura e lucidatura



NOVITA'

- HiLuster
- Dia-Lab
- Unipolish

dentoflex[®]
Catalogo prodotti

Strumenti per rifinitura e lucidatura



“DA OLTRE 50 ANNI L'AZIENDA NUMERO 1 NEI SILICONE POLISHERS”

Da oltre 50 anni, l'Identoflex è leader nella produzione di strumenti rotanti per la rifinitura, la lucidatura e per la profilassi mantenendo, pur con moderni processi di ricerca e innovazione, lo stesso spirito “artigianale” che sta alla base del notevole gradimento da parte degli utilizzatori professionali nel mondo.

Infatti, diversamente dalle maggiori case produttrici di silicone polishers che realizzano prodotti anche ad uso orafa e indu-

striale, l'Identoflex progetta e produce prodotti destinati esclusivamente all'utilizzo professionale dentale; i

ridotti volumi di produzione permettono, così, un controllo efficace e totale di tutte le fasi produttive in sintonia con la rinomata precisione e raggiungimento dei migliori standard qualitativi tipico delle aziende Svizzere.



“DA OLTRE 40 ANNI, L'AZIENDA ITALIANA CHE SELEZIONA I MIGLIORI PRODOTTI DAI MERCATI MONDIALI”

La Ravelli S.p.A., da sempre impegnata nell'importazione e distribuzione in Italia dei marchi leader mondiali nella produzione di prodotti dentali, ha riunito in questo catalogo quanto di meglio sia oggi disponibile sul mercato in tema di strumenti rotanti per la lucidatura e la profilassi: la gamma dei prodotti Identoflex. Il catalogo si divide in due sezioni (studio e laboratorio) contenenti, per ogni singolo prodotto, una breve descrizione delle caratteristiche e quali vantaggi derivino dal suo utilizzo.

In queste pagine troverete un'ampia gamma di prodotti per lo studio e il laboratorio che Vi consentiranno di affrontare con successo il Vostro impegno quotidiano.

Buon lavoro!

Studio











INDICE DEI PRODOTTI

- Gommini per compositi	pag. 5
- HiLuster per compositi	pag. 6
- DIA-BLU per compositi	pag. 7
- Gommini per amalgama e metalli	pag. 8
- MIN-gommini intercambiabili a scatto	pag. 9
- Kit amalgama e compositi	pag. 9
- DIA-CER per ceramica	pag. 10
- Gommini per profilassi	pag. 11
- Spazzolini e coppette Prophy per l'igiene e la profilassi	pag. 12
- S.A.P. Super Acrylic Polishers	pag. 13

dentoflex[®]

Gommini e spazzolini da studio

Indicazioni per l'impiego di gommini e spazzolini da studio

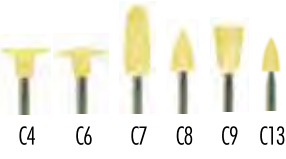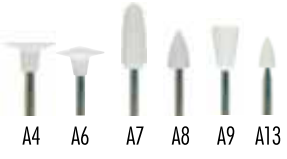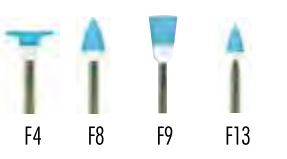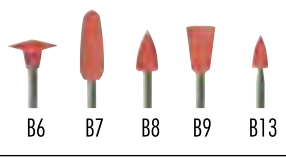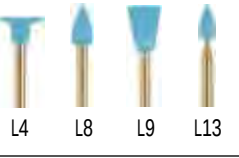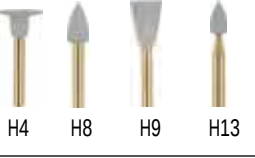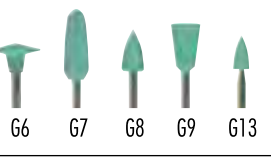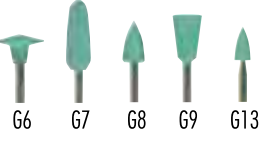Profilassi	 P13 P8 P9 P6	 CS CN	 CG GX MX
Compositi	 C4 C6 C7 C8 C9 C13	 A4 A6 A7 A8 A9 A13	 F4 F8 F9 F13
Amalgama	 B6 B7 B8 B9 B13	 L4 L8 L9 L13	 H4 H8 H9 H13
Ceramica		 G6 G7 G8 G9 G13	
Metalli e leghe	 D6 D7 D8 D9 D13	 G6 G7 G8 G9 G13	
Resine per protesi e ribasature	 160P 160F	 161P 161F	
	RIFINITURA	LUCIDATURA	BRILLANTATURA



Gommini per compositi

Il sistema più utilizzato per la rifinitura e lucidatura dei compositi



Minipunta / Fiamma

Rifinitura / lucidatura di superfici concave, soprattutto in area oclusale.



Coppetta

Rifinitura / lucidatura di superfici convesse e fessure, grazie al bordo sottile che raggiunge gli spazi interdentali e i lineangles.



Disco

Rifinitura / lucidatura di superfici convesse, soprattutto quelle dei denti frontali.

1° passaggio Rifinitura (C-gialli)



Disco 101**C4**w2



Lente 101**C6**w2



Perone 101**C7**w2



Fiamma 101**C8**w2



Coppetta 101**C9**w2



Minipunta 101**C13**w2

2° passaggio Lucidatura (A-bianchi)



Disco 101**A4**w2



Lente 101**A6**w2



Perone 101**A7**w2



Fiamma 101**A8**w2



Coppetta 101**A9**w2



Minipunta 101**A13**w2

Operazione

Rifinitura: gialli

Lucidatura: bianchi

Materiali

Compositi

VANTAGGI

- La particolare mescola messa a punto dalla Identoflex, adattata nel corso degli anni allo sviluppo dei nuovi materiali compositi, ha sempre garantito i migliori risultati clinici mantenendo, nel contempo, la massima semplicità di utilizzo.
- In soli due passaggi si ottengono superfici lisce senza rugosità o scalini.
- Utilizzabile con tutti i materiali compositi.
- Durata d'esercizio elevata.
- Per ottenere una lucidatura a specchio è possibile integrare il sistema con il gommmini diamantato DIA-BLU Identoflex.

CONFEZIONI

- Confezione 12 pz. singoli
- Confezione 12 pz. assortiti gialli (2x6 forme) Cod. **101CW2**
- Confezione 12 pz. assortiti bianchi (2x6 forme) Cod. **101AW2**



Identoflex®



HiLuster per compositi

Il sistema di lucidatura definitivo per i compositi di ultima generazione

Operazione

Lucidatura: celesti (GLOSS) Compositi

Brillantatura: grigi (DIA)

Materiali

VANTAGGI

- Lucidatura e brillantatura dei compositi in soli due passaggi grazie ad un rivoluzionario sistema basato sulla nuova tecnologia Identoflex HiLuster^{PLUS}.
- La notevole capacità di taglio del diamante consente di operare a basse velocità e con minor pressione di esercizio riducendo i rischi di bruciatura della matrice resinosa del composito ed il surriscaldamento della polpa dentaria.
- Superfici perfettamente levigate e brillanti anche sui compositi ad elevato contenuto di riempitivi.
- Utilizzabile con tutti i materiali compositi.
- Maggiore resistenza all'usura rispetto ai tradizionali gommini per compositi.

1° passaggio: Lucidatura (GLOSS-celesti)



Disco101L4w2




Minipunta101L13w2



Fiamma101L8w2



Coppetta101L9w2

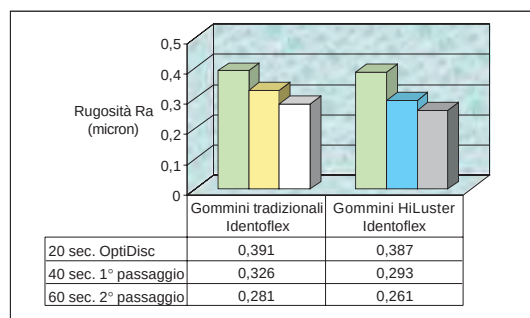



Graf. 1: rugosità superficiale misurata dopo ogni passaggio di 20 sec. sul composito Premise Kerr, precedentemente trattato con OptiDisc ruvido/medio



Elevata resistenza all'usura per un impiego duraturo nel tempo anche sui compositi di ultima generazione.

CONFEZIONI

- Confezione 6 pz. singoli
- KIT 8 pz. assortiti: GLOSS + DIA (4+4 forme) Cod. **113KH**

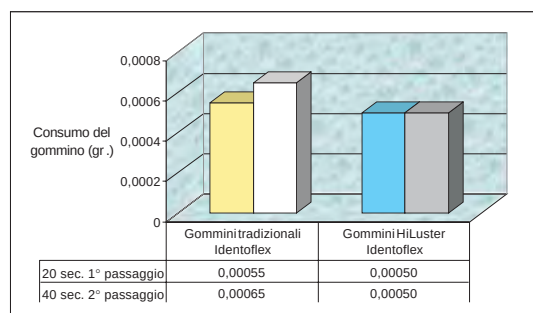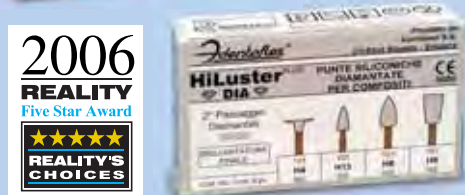

Graf. 2: consumo del gommino dopo ogni passaggio di 20 sec. sul composito Premise Kerr*

2° passaggio: Brillantatura (DIA-grigi)



Disco101H4w2



Minipunta101H13w2



Fiamma101H8w2



Coppetta101H9w2





DIA-BLU per compositi

Il gommino diamantato per la lucidatura a specchio dei compositi

Disco 101**F4**w2



Disco

Brillantatura di superfici convesse, soprattutto quelle dei denti frontali.

Fiamma 101**F8**w2



Minipunta / Fiamma

Brillantatura di superfici concave, soprattutto in area oclusale.

Minipunta 101**F13**w2



Coppetta

Brillantatura di superfici convesse e fessure, grazie al bordo sottile che raggiunge gli spazi interdentali e i lineangles.

Coppetta 101**F9**w2



Operazione

Brillantatura

Materiali


Compositi

VANTAGGI

- Lucidatura ottimale dei compositi ad alto contenuto di riempitivi grazie al maggior potere abrasivo del diamante.
- Durezza calibrata per non eliminare la macro e microgeografia superficiale creata durante la modellazione del restauro.
- Grazie alla capacità di taglio del diamante, si ottengono risultati ottimali già a basse velocità e con minor pressione d'esercizio riducendo i rischi di bruciatura della matrice resinosa del composito ed il surriscaldamento della polpa dentaria.
- La particolare costruzione a due zone tiene conto dei tipici modelli di usura: solo la zona attiva è riempita di granuli di diamante diminuendo, così, l'incidenza sul costo finale del prodotto.

CONFEZIONI

- Confezione 6 pz. singoli
- Confezione 8 pz. assortiti (2x4 forme) Cod. **101FW2**
- KIT 8 pz. assortiti: DIA-BLU + gialli (4+4 forme) Cod. **113KD**

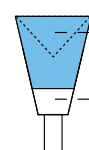

— Zona attiva blu con granuli di diamante
— Zona passiva bianca senza granuli di diamante



Dentoflex®



Operazione

Rifinitura
Lucidatura

Materiali

Amalgama
Metalli e leghe

VANTAGGI

- Efficaci e duraturi su tutti i tipi di restauri in amalgama e leghe grazie ai due differenti tipi di mescola.
- Ottenimento di superfici lisce in soli due passaggi.
- La particolare mescola riduce lo sviluppo di calore limitando le ossidazioni elettrolitiche dell'amalgama senza liberazione di mercurio.
- Rapporto ottimale prezzo-prestazioni.

CONFEZIONI

- Confezione 12 pz. singoli



Gommini per amalgama e metalli

Gli strumenti ideali per rifinire e lucidare amalgama, oro e leghe

1° passaggio: Rifinitura di amalgama (B-marroni)



Lente
100B6w2



Perone
100B7w2



Fiamma
100B8w2



Coppetta
100B9w2



Minipunta
100B13w2

1° passaggio: Rifinitura di oro e leghe (D-neri)



Lente
100D6w2



Perone
100D7w2



Fiamma
100D8w2



Coppetta
100D9w2



Minipunta
100D13w2



Rifinitura di superfici
in amalgama.



Lucidatura di superfici
in oro.

2° passaggio: Lucidatura di amalgama, oro e leghe (G-verdi)



Lente
100G6w2



Perone
100G7w2



Fiamma
100G8w2



Coppetta
100G9w2



Minipunta
100G13w2



MIN-gommini intercambiabili a scatto

Stessa qualità Identoflex, per la rifinitura di amalgama e compositi, a metà costo!

**Amalgama
(B-marroni)**

**Compositi
(C-gialli)**



Punta **B1**



Punta **C1**




Mandrino 112**M3**



Coppetta **B3**



Coppetta **C3**

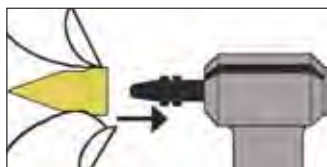

MIN System

Si sostituiscono i gommini con un semplicissimo scatto senza rimuovere il mandrino dal manipolo.

Kit amalgama e compositi



KIT AMALGAMA 113KA

Kit comprendente tutte le forme ideali per la rifinitura e la lucidatura dell'amalgama.

- Confezione 12 pz. (2 x B8-B9-B13-G8-G9-G13)



KIT COMPOSITI 113KC

Kit comprendente tutte le forme ideali per la rifinitura e la lucidatura dei compositi.

- Confezione 12 pz. (2 x C8-C9-C13-A8-A9-A13)

Operazione

Rifinitura

Materiali

Compositi

Amalgama

VANTAGGI

- Economici: il mandrino non si getta quando il gommino è consumato.
- Sostituzione rapida del gommino consumato grazie al sistema snap-on che evita di dover inserire e disinserire il mandrino dal contrangolo.
- Stesse prestazioni dei tradizionali gommini Identoflex montati per amalgama e compositi.

CONFEZIONI

- Confezioni 24 pz. singoli (Cod. **104B1-B3 / 107C1-C3**)
- Confezioni 24 pz. + mandrino (Cod. **103B1-B3 / 106C1-C3**)
- Confezioni 60 pz. singoli (Cod. **105B1-B3 / 108C1-C3**)
- Confezioni 3 mandrini (Cod. **112M3**)



Identoflex®



Operazione

Lucidatura a specchio

Materiali

Ceramica

Smalto

DIA-CER per ceramica

Il gommino diamantato per la lucidatura dei ritocchi su ceramica alla poltrona

VANTAGGI

- Un unico strumento per la lucidatura alla poltrona di ritocchi su corone, intarsi e faccette in ceramica.
- Durezza calibrata del legante silconico che, unito alla elevata capacità di taglio del diamante, consente una eliminazione efficace delle rugosità superficiali create dalle frese utilizzate per i ritocchi.
- Ottenimento di risultati ottimali anche a basse velocità e con minor pressione d'esercizio: i rischi di surriscaldamento della polpa dentaria sono così ridotti.
- Utilizzabile anche per la lucidatura dello smalto dentale a seguito della rimozione del cemento ortodontico.
- Solo la zona attiva è riempita di granuli di diamante diminuendo così l'incidenza sul costo finale del prodotto.

CONFEZIONI

- Confezione 6 pz. singoli
- Confezione 4 pz. assortiti (1x4 forme) Cod. **101KW2**



Minipunta / Fiamma

Lucidatura di ritocchi in area occlusale.



Minipunta 101**K13**w2



Fiamma 101**K8**w2




Minipunta / Fiamma

Eliminazione dei residui di cemento e lucidatura dello smalto dopo la rimozione dei brackets.



Disco 101**K4**w2

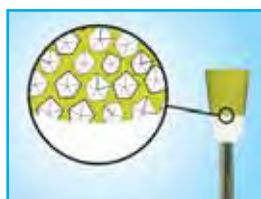

La matrice silconica ingloba nella zona attiva verde cristalli micronizzati di diamante naturale ad elevato potere di taglio.



Coppetta 101**K9**w2



Gommini per profilassi

Il gommino specifico per il trattamento di profilassi senza utilizzo di paste



Fiamma 102**P8**w2



Minipunta 102**P13**w2



L'utilizzo senza paste per profilassi elimina i disagi, per operatore e paziente, dovuti agli schizzi e alle interruzioni per l'applicazione della pasta.

Il campo operativo risulta sempre pulito e ben visibile.



Coppetta 102**P9**w2



Lente 102**P6**w2



Operazione

Igiene e profilassi

Materiali

Smalto
Compositi

VANTAGGI

- Campo operativo sempre pulito e ben visibile per una facile individuazione delle macchie da rimuovere.
- Eliminazione dell'effetto "splattering" dovuto agli schizzi durante l'uso di paste per profilassi.
- Abrasione minima per non ledere i tessuti.
- Un solo passaggio per diminuire i tempi d'intervento.
- Utilizzabili sia sullo smalto dentale che sui restauri in composito.
- 4 forme per raggiungere ogni zona del dente.

CONFEZIONI

- Confezione 12 pz. singoli



Identoflex®



Operazione

Igiene e profilassi

Materiali

Smalto

Materiali da restauro

Spazzolini e coppette Prophy per l'igiene e la profilassi

Il sistema completo per ogni esigenza di igiene e profilassi alla poltrona

VANTAGGI

- Spazzolini con due tipi di setole per un'azione di pulizia profonda o leggera.
- Coppette in gomma palmata ad azione soft per non ledere i tessuti.
- Rimozione efficace di placca e pigmentazioni.
- Lucidatura a specchio di tutte le superfici.
- Utilizzabili con tutti i tipi di pasta per profilassi e lucidatura.
- Integrazione ottimale con i gommini per lucidatura e profilassi Identoflex.

CONFEZIONI

Spazzolini

- Confezione 12 pz. singoli (**114CN-114CS**)
- Confezione 60 pz. singoli (**114CN60-114CS60**)

Coppette

- Confezione 24 pz. singoli (**114CG**)
- Confezione 144 pz. + 3 mandrini (**114GX**)
- Confezione 6 mandrini MX (**114MX**)



Setola hard **114CS**



Nylon soft **114CN**



Spazzolino setola-nylon

Ideale per la pulizia all'interno di solchi e fossette.



Coppetta montata **114CG**



Coppetta Prophy

Ideale per l'utilizzo con tutte le paste per profilassi e brillantatura sulle superfici convesse.



Coppetta **114GX**
Snap-on



Mandrino a bottone **114MX**



S.A.P. Super Acrylic Polishers

Peroni siliconici montati ideali per rifinire e lucidare alla poltrona le resine acriliche

1° passaggio - Rifinitura (Blu)



Fiamma **160F**



Perone **160P**

S.A.P.

Rapidità e comodità nelle operazioni di rifinitura eseguite direttamente in studio.



2° passaggio - Lucidatura (Azzurri)



Fiamma **161F**



Perone **161P**

Operazione

Rifinitura: blu
Lucidatura: azzurri

Materiali

Resine acriliche
Materiali siliconici per ribasature

VANTAGGI

- Nuova formulazione di legante e sostanze abrasive per evitare surriscaldamenti e bruciature della resina.
- Indispensabili per ritoccare e adattare velocemente alla poltrona protesi e dispositivi ortodontici.
- Ideali anche per la rifinitura dei bordi di protesi ribasate alla poltrona con resine morbide e rigide.
- Tempi di lavoro ridotti grazie alla possibilità di eseguire direttamente in studio le operazioni di lucidatura.

CONFEZIONI

- Confezione 6 pz. singoli



dentoflex®

Guida all'utilizzo e norme di sicurezza

Studio e Laboratorio

I prodotti Identoflex sono stati progettati e realizzati per il loro utilizzo specifico previsto. Un uso improprio e/o diverso degli stessi può causare lesioni ai tessuti, usura anticipata, danni agli strumenti e pericoli per l'operatore, il paziente o terze persone.

I prodotti Identoflex sono destinati esclusivamente ad un utilizzo da parte di personale qualificato.

UTILIZZO CORRETTO

- Impiegare esclusivamente contrangoli e manipoli ineccepibili da un punto di vista tecnico ed igienico, ben puliti e sottoposti a regolare manutenzione.
- I gambi devono essere inseriti alla maggior profondità possibile nelle pinze di tenuta.
- Porre gli strumenti in rotazione prima della loro entrata in contatto con la superficie da lavorare.
- Utilizzare sempre con leggeri movimenti circolari. Per non creare surriscaldamenti, bruciature e solchi, non insistere troppo sullo stesso punto.
- Azioni di leva o eccessivi scarti laterali aumentano il pericolo di rottura degli strumenti.
- Gli strumenti piegati o senza coassialità di rotazione devono essere immediatamente scartati.
- Centrare perfettamente i gommini non montati sui relativi mandrini per evitare vibrazioni. Utilizzare esclusivamente mandrini originali Identoflex o di primarie aziende del settore.
- Indossare sempre lenti o schermi di protezione per evitare che lo strumento e/o il pezzo lavorato, rompendosi, possa colpire gli occhi o il viso.
- Utilizzare un dispositivo di protezione per le vie respiratorie per evitare di inalare i residui della lavorazione. Una bocca aspirante od un box per rettifica costituiscono un ulteriore valido presidio.

NUMERO DI GIRI

- Non superare mai il numero di giri massimo consentito indicato sulle confezioni. I migliori risultati di lucidatura si ottengono attenendosi al numero di giri consigliato per ogni singolo strumento.
- Al superamento del numero di giri consentito, gli strumenti, soprattutto quelli con parte operativa molto superiore al diametro del gambo, tendono ad oscillare con possibili deformazioni e/o rotture del mandrino e conseguenti rischi per l'operatore, il paziente e terze persone.

PRESSIONI OPERATIVE

- Un'eccessiva pressione sugli strumenti può causare:
 - surriscaldamento del materiale lavorato e conseguente trasmissione del calore ai tessuti vitali del dente;
 - deformazioni e/o bruciature dei materiali a base resinosa;
 - danneggiamento o eccessiva usura dello strumento lucidante.

RAFFREDDAMENTO

- Durante l'utilizzo degli strumenti lucidanti nel cavo orale, garantire sempre un sufficiente raffreddamento con spray d'acqua (minimo 50 ml/min).

STOCCAGGIO

- Stoccare gli strumenti nella loro confezione originale per consentirne l'identificazione e un utilizzo sicuro attraverso le informazioni presenti sull'etichetta. Conservare i prodotti a temperatura ambiente e al riparo da polvere, umidità ed eventuali contaminazioni.
- Se si prevedono condizioni di conservazione diverse, prendere visione delle informazioni relative all'utilizzo dello strumento prima di prelevare dall'imballaggio originale (numero di giri, pressione operativa, misure di protezione, ecc.).



N.B.: Ci riserviamo il diritto di modificare la gamma dei prodotti e le loro caratteristiche, così come di deviare dalle illustrazioni e dai dati pubblicati.

Identoflex®

Laboratorio



INDICE DEI PRODOTTI

- LUCENT	pag. 17
- DIA-LAB	pag. 18
- PIN e MAXIPIN	pag. 19
- LABMIN	pag. 20
- CEROMER-CEROBRUSH	pag. 21
- S.A.P. Super Acrylic Polishers	pag. 22
- UNIPOLISH	pag. 23

Dentoflex[®]

Gommini da laboratorio

Indicazioni per l'impiego di gommini e spazzolini da laboratorio

Resine per protesi e ortodonzia

LAB MIN - S.A.P.

Metalli e Leghe

Lucent

Pin e Maxi Pin

Compositi

Lucent

Ceromeri e Vetropolimeri

Ceromer - Cerobrush

Ceramica

Dia-Lab

L22VE R22VE PVE 127M6

L22VE R22VE PVE 127M6

150F 150L 150R

LMF1 LMM1 160P 160F

L22GR R22GR PGR 127M6

PB 127M6 MB 134M6

L22GR R22GR PGR 127M6

170D 170R

151F 151L 151R

LMF2 LMM2 161P 161F

L22VI R22VI PVI 127M6

PG 127M6 MG 134M6

L22VI R22VI PVI 127M6

171R 171P 171C

152F 152L 152R

SGROSSATURA

RIFINITURA

LUCIDATURA



LUCENT

Gommini universali per la rifinitura e lucidatura di resine composite e metalli

1° passaggio - Sgrossatura (Verdi)



Lente
L22VE



Ruota
R22VE



Pin
PVE



127M6

Pin
Piccoli ritocchi nella zona
occlusale.



2° passaggio - Rifinitura (Grigi)



Lente
L22GR



Ruota
R22GR



Pin
PGR



127M6



Lente
Lucidatura in zone di difficile accesso.

3° passaggio - Lucidatura finale (Viola)



Lente
L22VI



Ruota
R22VI



Pin
PVI



127M6

Operazione

Sgrossatura: verde
Rifinitura: grigio
Lucidatura: viola

Materiali

Metalli e leghe
Resine composite

VANTAGGI

- Il sistema di lucidatura permette la sgrossatura, la rifinitura e la lucidatura delle resine composite e delle strutture metalliche che le supportano, senza dover continuamente cambiare il tipo di gommino.
- La combinazione tra le sostanze abrasive ed il legante siliconico garantisce, al variare della pressione e del numero di giri, un'azione uniforme anche su materiali di durezza diversa dando alle superfici un aspetto omogeneo senza scalini o rigature.
- Tre gradi di abrasività: dalla sgrossatura alla lucidatura a specchio.

CONFEZIONI

- Confezione 24 pz. singoli
- Confezione 60 pz. singoli
- Confezione 24 pz. singoli + mandrino (**Pin**)
- Confezione 6 mandrini (**Pin**)



Identoflex®



DIA-LAB

Gli strumenti ideali per la lucidatura dei materiali ceramici

Operazione

Sgrossatura: blu
Lucidatura: rosa
Brillantatura: grigi

Materiali

Ceramica
Metalli e leghe

VANTAGGI

- Sistema di lucidatura ad alte prestazioni e lunga durata per tutti i materiali ceramici, metalli e leghe.
- Le particelle abrasive di diamante naturale disperse nel legante sintetico garantiscono, al variare della pressione e del numero di giri, un'azione efficace ed omogenea senza rigare le superfici.
- Tre gradi di abrasività e tre forme per la sgrossatura, rifinitura e lucidatura a specchio in pochi istanti anche degli spazi più angusti.
- Evitano ulteriori cotture della ceramica e l'utilizzo di paste lucidanti a seguito di ritocchi e correzioni.

CONFEZIONI

- Confezione 1 pz. singolo



1° passaggio - Sgrossatura (Blu)



Punta 150F



Lente 150L



Ruota 150R

2° passaggio - Lucidatura (Rosa)



Punta 151F



Lente 151L



Ruota 151R

3° passaggio - Brillantatura (Grigi)



Punta 152F



Lente 152L



Ruota 152R





PIN e MAXIPIN

Punte a mina intercambiabili per la rifinitura e la lucidatura dei metalli

1° passaggio - Rifinitura (Marroni)



Pin **PB**



MaxiPin **MB**



127M6



134M6

MaxiPin

Interventi su superfici ampie di leghe vili.



Pin

Lucidatura di solchi e fossette su oro e leghe preziose.

2° passaggio - Lucidatura finale (Verdi)



Pin **PG**



MaxiPin **MG**



127M6



134M6

Operazione

Rifinitura: marrone

Lucidatura: verde

Materiali


Metalli e leghe

VANTAGGI

- Due diametri differenti per raggiungere anche le zone più difficili.
- Apposito mandrino per la sostituzione rapida delle punte.
- Utilizzo completo senza sprechi.
- Due gradi di abrasività per ogni tipo di esigenza.

CONFEZIONI

- Confezione 24 pz. singoli
- Confezione 60 pz. singoli
- Confezione 24 pz. singoli + mandrino
- Confezione 6 mandrini

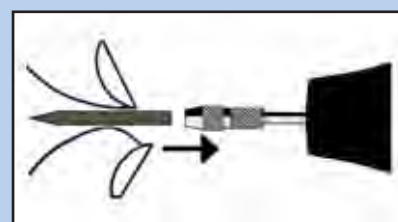

Dentoflex®



Operazione

Rifinitura: marrone

Lucidatura: grigio

Materiali

Resine acriliche

VANTAGGI

- Eliminano in pochi secondi i segni lasciati dai fresoni usati per la sgrossatura.
- Le due forme disponibili, tra cui il comodo cilindretto in grado di raggiungere anche i punti più difficili, s'inseriscono velocemente sugli appositi mandrini riutilizzabili assicurando un consumo pressoché totale del prodotto senza sprechi.
- Due gradi di abrasività per ottenere superfici perfettamente lisce.

CONFEZIONI

- Confezione 12 pz. singoli (LMF)
- Confezione 60 pz. singoli (LMF-LMM)
- Confezione 12 pz. singoli + mandrino (LMF)
- Confezione 6 mandrini (134M6-144M6)
- Confezione 24 pz. singoli (LMM)
- Confezione 24 pz. singoli + mandrino (LMM)



LAB MIN

Peroni silconici intercambiabili per rifinire e lucidare le resine acriliche

1° passaggio - Rifinitura (Marroni)



Fiamma **LMF1**



144M6



Cilindretto **LMM1**



134M6



Fiamma LMF
Rifinitura di ampie superfici.

Cilindretto LMM
Lucidatura nella zona dei colletti.



2° passaggio - Lucidatura finale (Grigi)



Fiamma **LMF2**



144M6



Cilindretto **LMM2**



134M6



CEROMER-CEROBRUSH

Gommini e spazzolini per la rifinitura e lucidatura di resine composite

1° passaggio - Rifinitura (Gommini Ceromer)




Ruotina **170R**



Disco **170D**

Disco
Rifinitura delle zone
interprossimali.

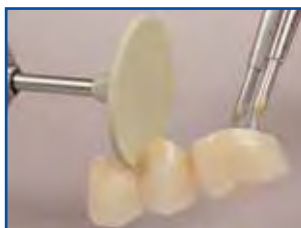

Minipunta
Lucidatura a specchio
di solchi e fossette.

2° passaggio - Lucidatura (Spazzolini Cerobrush)



Ruota **171R**



Minipunta **171P**



Pennello **171C**



Operazione

Rifinitura:
Ceromer gommino
Lucidatura:
Cerobrush spazzolino

Materiali

Ceromeri
Vetropolimeri

VANTAGGI

- Azione abrasiva omogenea ed uniforme sia sul riempitivo vetroso che sulla matrice resinosa per evitare gradini o fessurazioni.
- Possibilità di personalizzare il grado di lucidatura per pazienti giovani (serica) o anziani (brillante).
- Efficaci e duraturi su tutti i tipi di compositi da laboratorio.
- Efficaci anche a bassa velocità e con pressione d'esercizio minima per evitare surriscaldamenti e conseguente distruzione della tessitura superficiale.
- La combinazione di diverse forme gommino-spazzolino consente di accedere a qualsiasi zona del dente.

CONFEZIONI

- Confezione 3 pz. singoli



Particelle di
Silicio Micronizzato
inglobate in ogni
filamento di setola

Ogni setola è uno strumento di lucidatura!



Operazione

Rifinitura: blu
Lucidatura: azzurro

Materiali

Resine acriliche
Materiali siliconici
per ribasatura

VANTAGGI

- Nuova formulazione di legante e sostanze abrasive per evitare surriscaldamenti e bruciature della resina.
- Ideali per chi preferisce la comodità del gommino già montato sul mandrino.
- Due nuovi gradi di abrasività per ottenere superfici ancora più lisce.
- Durata d'esercizio elevata.

CONFEZIONI

- Confezione 6 pz. singoli



S.A.P. Super Acrylic Polishers

Peroni siliconici montati per rifinire e lucidare le resine acriliche

1° passaggio - Rifinitura (Blu)




Fiamma **160F**



Perone **160P**

S.A.P.

Prelucidatura di ampie superfici.

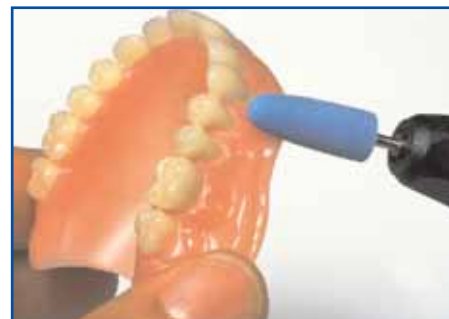

2° passaggio - Lucidatura (Azzurri)




Fiamma **161F**



Perone **161P**

UNIPOLISH

Pasta lucidante universale per tutti i materiali da laboratorio

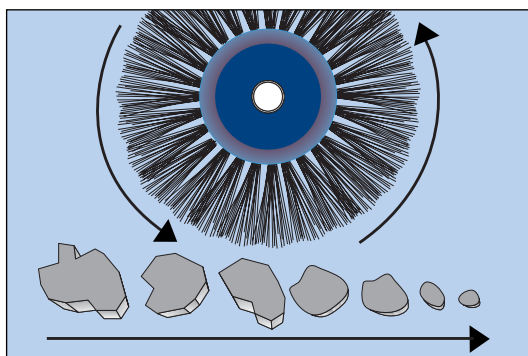

Riduzione delle particelle abrasive

UNIPOLISH è la prima pasta universale con indice di abrasione variabile per la lucidatura di tutti i materiali impiegati nel laboratorio odontotecnico.

La sostanza abrasiva presente in UNIPOLISH si trasforma, sotto l'azione meccanica delle spazzole da lucidatura, da grossa a fine (fig. 1). Ad una prima azione abrasiva e pulente della pasta, tale da favorire l'eliminazione dei residui lasciati dagli strumenti rotanti utilizzati per la rifinitura (gommini) e le sostanze per la pre-lucidatura (pomice e paste in blocco), segue una fase di frantumazione ed arrotondamento dei cristalli abrasivi che aumentano progressivamente l'effetto brillantante della pasta (fig.2). Questa proprietà risulta determinante soprattutto se paragonata alle paste per lucidatura diamantate convenzionali; a differenza di questi materiali, UNIPOLISH non crea le caratteristiche striature sulle superfici del manufatto determinate dalla sovrapposizione dei grani di diamante sotto l'azione delle spazzole (fig. 3).


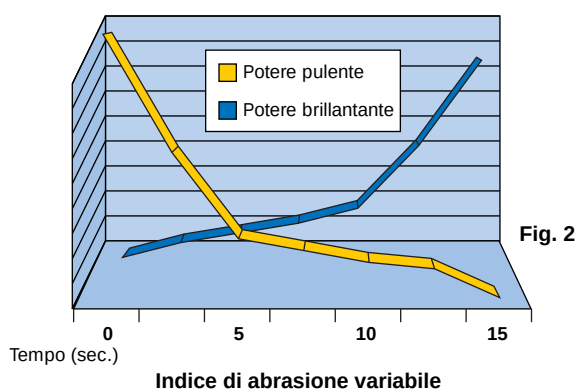


Fig. 2

Superfici trattate con paste lucidanti

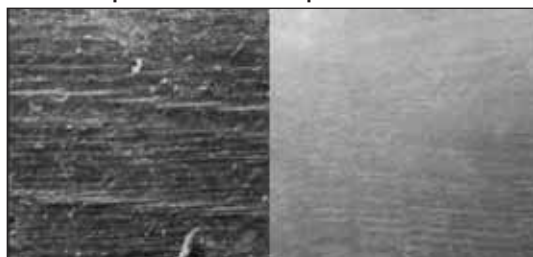

Paste diamantate convenzionali

UNIPOLISH

Fig. 3

Operazione

Lucidatura a specchio

Materiali

Metalli

Resine

Ceramica

VANTAGGI

- Con UNIPOLISH è possibile ottenere una lucentezza ineguagliabile su tutti i materiali impiegati in laboratorio e sono sufficienti pochi passaggi di spazzola per ottenere la brillantezza desiderata.
- L'abrasione variabile dei cristalli non determina alcuna striatura sulle superfici e non altera eventuali caratterizzazioni di colore o morfologiche.
- Rimane aderente alle superfici senza colature, impastamenti e schizzi evitando il contatto diretto tra la spazzola e il manufatto che rimane così protetto da possibili bruciature.
- Le superfici rimangono lisce per lungo tempo diminuendo l'accumulo di placca e facilitando la pulizia della protesi.

CONFEZIONI

- Confezioni: Vasetto da 300 ml. Cod. 320U



dentoflex®



Edentoflex®

Distributore esclusivo per l'Italia



Tel. 023357261 - Fax 0233572626
www.ravellispa.it - ravelli@ravellispa.it