

Amplifica le tue possibilità grazie all'energia sonora.
Sfrutta la potenza di SonicFill™3!



SonicFill™3

Sistema di composito SingleFill™

Fase 1 Applicare SonicFill™3 e modellare.

Fase 2 Non c'è una seconda fase.

Presentazione del nuovo sistema di composito avanzato SonicFill 3 SingleFill™.

Si tratta del primo sistema di composito bulk fill attivato dall'energia sonora che consente di realizzare restauri di qualità con maggiore facilità e velocità rispetto alla tecnica di stratificazione incrementale. Realizzare dei restauri di lunga durata in un'unica fase.

KAVO  **Kerr**

Supportato da 125 anni di esperienza

Negli ultimi 10 anni, il sistema SonicFill Kerr ha permesso a migliaia di dentisti in tutto il mondo di eseguire restauri posteriori di qualità con un procedimento SingleFill di facile utilizzo che combina sia i vantaggi di un composito fluido che di uno modellabile.


La chiave del suo successo è fornita dall'esclusiva tecnologia attivata dall'energia sonora, la quale combina la conoscenza esclusiva della scienza dei materiali Kerr con l'uso innovativo dell'energia sonora, proveniente da know-how di KaVo dei manipoli. Il risultato è un prodotto rivoluzionario che aiuta i dentisti a ridurre i tempi di permanenza del paziente sulla poltrona, migliorando al contempo i risultati clinici e l'esperienza del paziente.



Una tecnologia unica e brevettata


Il segreto di SonicFill risiede nella resina proprietaria altamente riempita con speciali modificatori che reagiscono all'energia sonora applicata attraverso il manipolo.

Quando viene applicata energia sonora, la viscosità diminuisce (fino all'84%), consentendo un posizionamento rapido e preciso sulle pareti della cavità. Quando l'energia sonora viene interrotta, il composito ritorna in un stato più viscoso, perfettamente scolpibile e modellabile.

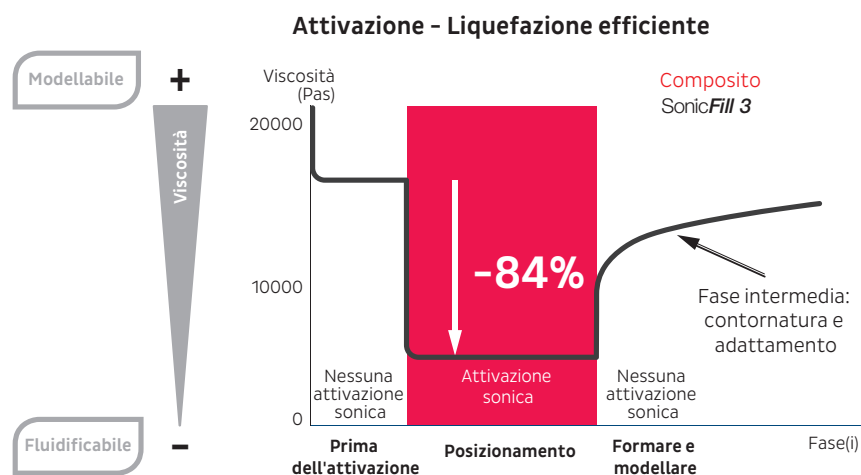

I migliori vantaggi del composito fluido e modellabile uniti in un solo prodotto

Il nuovo SonicFill™3 è l'unico composito bulk fill ad attivazione sonora che funge da liner di cavità in termini di adattamento e posizionamento rapido, ma anche come composito modellabile quando si tratta di sagomatura e rifinitura.

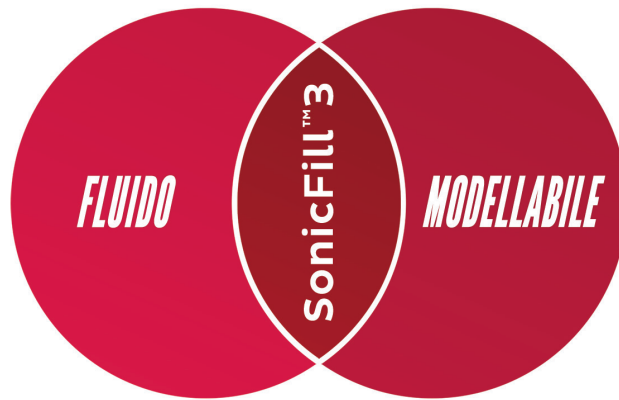

I migliori benefici del composito FLUIDO


- Adattamento migliorato a pareti e margini interni
- Posizionamento rapido
- Basso stress da contrazione

I migliori benefici del composito MODELLABILE

- Trattamento migliorato e facile da lucidare
- Eccezionali proprietà meccaniche
- Non è richiesto alcun liner o rivestimento delle cavità

Meno fasi e meno possibilità di sbagliare

SonicFill™ 3 sostituisce le tradizionali tecniche di stratificazione multi-fase che richiedono tempo con un sistema di composito SingleFill™ che elimina la necessità di posizionare un liner oppure un rivestimento finale del restauro.

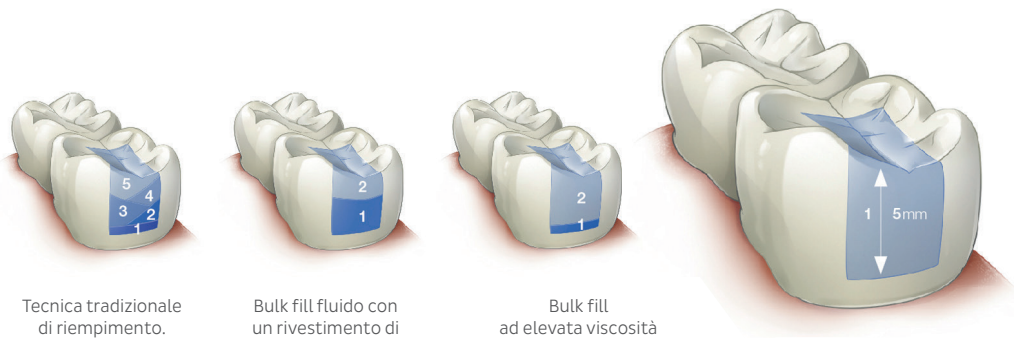

Tecnica tradizionale di riempimento.
Vari riempimenti.

Bulk fill fluido con un rivestimento di composito universale.
Due riempimenti.


Bulk fill ad elevata viscosità con liner fluido.
Due riempimenti.

Sistema SonicFill™
FINO A 5 MM
1 SOLO RIEMPIMENTO

Risultati comprovati. Un passo avanti rispetto agli altri

Stress da contrazione


SonicFill™ 3 presenta uno stress da contrazione più ridotto rispetto sia a Filtek™ One Bulk Fill che a Tetric EvoCeram®.*

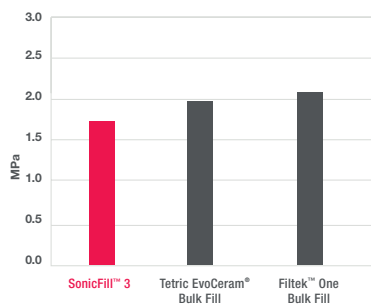

*Stress da contrazione a 2 minuti


Resistenza alla flessione

SonicFill™ 3 presenta una resistenza alla flessione più elevata rispetto sia a SDR® Flow+ che a Tetric EvoCeram® Bulk Fill.*

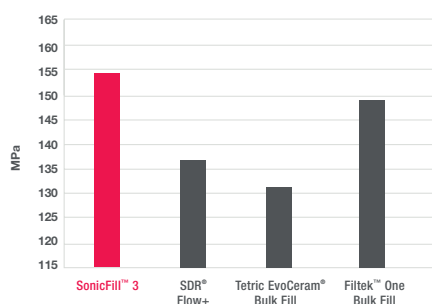

Grado di conversione

A 5 mm, SonicFill™ 3 ha mostrato una durezza dell'86,6% nella parte inferiore rispetto alla parte superiore.*

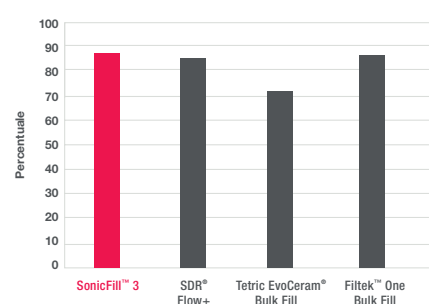

* Dati di test interni Kerr
Dati su file, disponibili su richiesta

Ricostruzioni di qualità che resistono alla prova del tempo, con una procedura più rapida

La realizzazione di ricostruzioni di lunga durata non è mai stata così facile o efficiente. Grazie al migliorato adattamento, il nuovo e avanzato SonicFill™3 sta già aiutando i dentisti a eseguire lavori di ricostruzione con maggiore facilità e precisione e con risultati più prevedibili e affidabili. SonicFill 3 è indicato per l'applicazione diretta in tutte le classi cavitare nei denti anteriori e posteriori. È inoltre indicato per piccole ricostruzioni occlusali e del moncone (fare riferimento all'IFU per un elenco completo di indicazioni).

Vecchia sostituzione dell'amalgama con SF3



Ripristino profondo e grande classe II con SF3



Sfruttare la potenza di SonicFill™ 3!

3 passi avanti nelle prestazioni

Il sistema di composito SonicFill™ 3 bulk fill trasforma noiose e ripetitive ricostruzioni posteriori in un posizionamento semplice e affidabile Single-Fill. Il nuovo SonicFill™ 3 bulk fill avanzato presenta un **adattamento migliorato**, è anche **più facile da trattare e modellare** e **più semplice da estrarre** durante il posizionamento, confrontato ai suoi predecessori. I benefici finali sono il minor tempo di applicazione dei restauri sui pazienti, risultati più prevedibili e ricostruzioni affidabili e di lunga durata.


1

ABBI FIDUCIA



Esecuzione sicura

La reazione drastica all'energia sonora applicata attraverso l'esclusivo manipolo KaVo riduce la viscosità del composito nanoibrido Kerr fino all'84%. Ciò consente un grande adattamento per ricostruzioni affidabili e prevedibili.

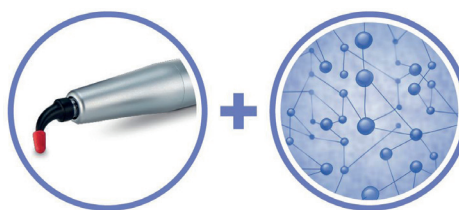


2

MAGGIORE RAPIDITÀ



Procedura più rapida

SonicFill 3 trasforma ricostruzioni posteriori noiose e ripetitive in un posizionamento Single-Fill facile e rapido: riempimento di cavità fino a 5 mm di profondità in un singolo incremento, con un materiale unico e senza liner o riempimento delle cavità. Le punte ergonomiche consentono un facile accesso alla cavità.

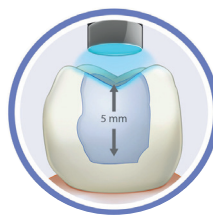


3

MAGGIORE SICUREZZA



Prestazioni durature

Elevato carico di riempimento (81% in peso). Una minore sollecitazione da contrazione consente un'elevata integrità marginale, riducendo al minimo vuoti e fessure nel composito. Oltre a queste eccellenti proprietà meccaniche, il prodotto presenta anche un'eccellente resistenza all'usura e alla flessione che assicurano al restauro integrità e durata nel tempo.

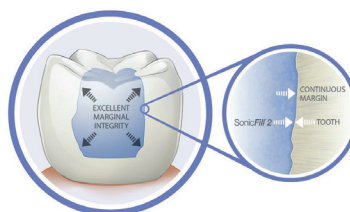

Restate sintonizzati

Prodotti versatili, comunicazione versatile. Esistono molti modi per restare in contatto con Kerr Dental e conoscere i nostri ultimi sviluppi e novità.



Connettetevi con noi

Tramite i nostri canali social



Ricevete aggiornamenti

Iscrivendovi alla nostra newsletter



Parlate con noi

Attraverso i nostri rappresentanti locali



Scoprite le novità

Visitando il nostro sito web

BIO-MKT-SS-002_Rev00

Sperimentate il sistema di composito SonicFill™ 3 SingleFill nella pratica

Informazioni per l'ordine

Kit introduttivo SonicFill™3

Il kit introduttivo è un modo ideale per iniziare a usare SonicFill 3. Contiene un manipolo SonicFill, un "Kit di preparazione", una guida tecnica e un totale di 60 puntali Unidose: 30 puntali Unidose in A3, 20 punte Unidose in A2 e 10 puntali Unidose in A1.

36715 Kit introduttivo SonicFill™3

Ricariche Unidose SonicFill™3

Ogni ricarica contiene 20 puntali Unidose ognuno da 0,25 gr

36711 Composito A1 SonicFill™3

36712 Composito A2 SonicFill™3

36713 Composito A3 SonicFill™3

36714 Composito B1 SonicFill™3

Manipolo e accessori

1.007.7400 Manipolo SonicFill™

0.553.1210 Attacco 457 MultiFlex

