

Paladur®

CE 0044



Istruzioni di impiego Paladur®

Colori rosa (1), rosa venato (3),
R 50 venato (4) e trasparente (7)

Composizione

Resina polimerizzabile a freddo, costituita da polvere e liquido

Componente principale della polvere:

metilmetacrilato – copolimero

Componenti del liquido:

metilmetacrilato, dimetacrilato

Paladur è privo di cadmio

Indicazioni

Resina per il ripristino funzionale di protesi in odontotecnica estensione, completamento, e riparazione nonché per ribasamento parziale e totale.

Per protesi dentaria estraibile e ferma.

Controindicati

Ribasamenti diretti con Paladur sono controindicati.

Impiego

Miscelare per 15 s polvere e liquido in rapporto di ca. 5 g : 3 ml. Approntare la quantità desiderata di liquido in una scodellina e versare la polvere, finché residua un sottile strato di liquido.

L'impasto fluido-gocciolante può essere utilizzato immediatamente. Applicare uno strato uniforme di Paladur; quando la consistenza è plastica non toccare né modellare.

A temperatura ambiente di 23 °C il tempo di indurimento è di ca. 9–12 min.

L'uso del Palamat® practic a 55°C, 2 bar (10 min) assicura una polimerizzazione ottimale senza formazione di bolle.

Dovendo applicare quantità notevoli di Paladur e non disponendo di polimerizzatore a pressione, procedere a strati. Ogni strato deve essere perfettamente indurito e freddo, prima di applicare dell'altro impasto.

Lavorazione preliminare

Per la realizzazione del modello si consiglia un gesso duro. Eliminare con cura ogni residuo di cera dalle parti in resina. Stendere due strati di isolante Aislar® Heraeus Kulzer sul modello di gesso saturato d'acqua. Le aree in resina da collegare vanno irruvidite estesamente. Non occorre prevedere ritenzioni meccaniche.

Conservazione

Non usare oltre la data di scadenza.

Non conservare a temperature superiori ai 25 °C. Evitare la luce solare diretta.

Dopo l'uso chiudere accuratamente i flaconi. Conservare fuori dalla portata di bambini.

Indicazioni di pericolo per il liquido

Facilmente infiammabile! Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. A contatto con la pelle può causare fenomeni di sensibilizzazione. Conservare il flacone ben chiuso e in luogo ben ventilato. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non gettare i residui nelle fognature. Usare quanti adatti.

Confezioni

Confezioni singole

Polvere

100 g, 500 g, 1000 g,

6 x 1000 g, 12 000 g

Liquido

80 ml, 500 ml, 3000 ml

® = marchio registrato della
Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG



Heraeus

Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11

D-63450 Hanau

www.heraeus-kulzer.com

E-Mail: info.lab@heraeus-kulzer.com