

thermaprep® 2

Calore tridimensionale
per un'otturazione tridimensionale



- Calore tridimensionale
- Indicatori luminosi e acustici
- Supporti otturatori a lento rilascio
- Facile manutenzione

thermaprep® 2

Calore tridimensionale per un'otturazione tridimensionale

Calore tridimensionale

Gli otturatori vengono riscaldati in pochi secondi singolarmente o contemporaneamente. Il calore tridimensionale viene mantenuto in modo uniforme nella camera di riscaldamento finché l'otturatore è pronto all'uso, rendendolo ideale per il trattamento di canali multipli.

Indicatori luminosi e acustici

Il fornello si avvale di indicatori acustici e luminosi a LED per indicare le diverse fasi operative.



Supporti otturatori a lento rilascio

I supporti degli otturatori sono stati realizzati per permettere un movimento verticale stabile di entrata e uscita dalla camera di riscaldamento.

Cleaning Mode

Questa particolare funzione permette di aumentare la temperatura del fornello fino ad ammorbidire la guttaperca rimasta all'interno della camera di riscaldamento e consentirne la facilerimozione.

- Il fornello riscalda gli otturatori in 20-49 secondi, in base alla loro dimensione
- Il timer integrato avverte acusticamente quando il materiale di riempimento raggiunge la temperatura corretta
- L'otturatore viene mantenuto alla temperatura corretta per 90 secondi.

Fornello thermaprep® 2

Contenuto:

- Fornello Thermaprep® 2
- Spazzolino per la pulizia
- Ulteriori etichette identificative*

EU 230V REF A 0176 230 002 00
UK 230V REF A 0176 230 002 33
115V REF A 0176 115 002 00

Fornello thermaprep® 2 kit per ProTaper Universal®

Contenuto:

- Fornello Thermaprep® 2
- Otturatori ProTaper® Universal F1 x6 REF A 1411
- Otturatori ProTaper® Universal F2 x20 REF A 1411
- Otturatori ProTaper® Universal F3 x6 REF A 1411
- Spazzolino per la pulizia
- Ulteriori etichette identificative*

EU 230V REF A 176C 230 002 00
UK 230V REF A 176C 230 002 33
115V REF A 176C 115 002 00

Fornello thermaprep® 2 – kit per Thermafil®

Contenuto:

- Fornello Thermaprep® 2
- Thermafil® Verifiers assortimento REF A 0175
- Otturatori Thermafil® kit per posteriori x20 REF A 0167
- Spazzolino per la pulizia
- Ulteriori etichette identificative*

EU 230V REF A 176A 230 002 00
UK 230V REF A 176A 230 002 33
115V REF A 176A 115 002 00

Fornello thermaprep® 2 kit per wave•one™

Contenuto:

- Fornello Thermaprep® 2
- Otturatori wave•one™ small x6 REF A 1700
- Otturatori wave•one™ primary x20 REF A 1700
- Otturatori wave•one™ large x6 REF A 1700
- Spazzolino per la pulizia
- Ulteriori etichette identificative*

EU 230V REF A 176B 230 002 00
UK 230V REF A 176B 230 002 33
115V REF A 176B 115 002 00

* Oltre agli otturatori Thermafil®, il fornello Thermaprep®2 può essere utilizzato anche con gli otturatori ProTaper® Universal, wave•one™ e System GT®. In tutte le versioni sono incluse ulteriori etichette identificative per adattare il fornello al sistema scelto.

Distribuito da:



Dentsply Tulsa Dental Specialties
608 Rolling Hills Drive
Johnson City, TN 37604

Prodotto nei Paesi Bassi



SIMIT-DENTAL s.r.l.
I - 46100 MANTOVA Italy - Via Pisacane, 5/A
Tel. (0376) 267.811 r.a. - Fax (0376) 381.261
e-mail: info@simitdental.it - www.simitdental.it