




OPUS BULK FILL

Composito fotopolimerizzabile per riempimento
singolo di denti posteriori.

RISULTATI MASSIMIZZATI



**Completamento
dei restauri del
75% più rapido.***

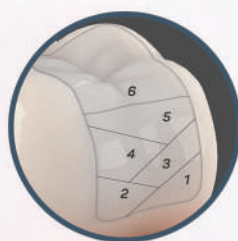

Tecnica
incrementale




Tecnica di
riempimento in
grande quantità




- Maggiore profondità di polimerizzazione: fino a 5 mm.
- Minore sollecitazione da contrazione.
- Tempo di lavorazione più lungo per la modellazione: stabilità sotto il riflettore/in luce ambiente.
- Maggiore opacità dopo la polimerizzazione.
- Non richiede rivestimento di copertura: restauro completo con un unico composito.

*A confronto con le normali
procedure di restauro.

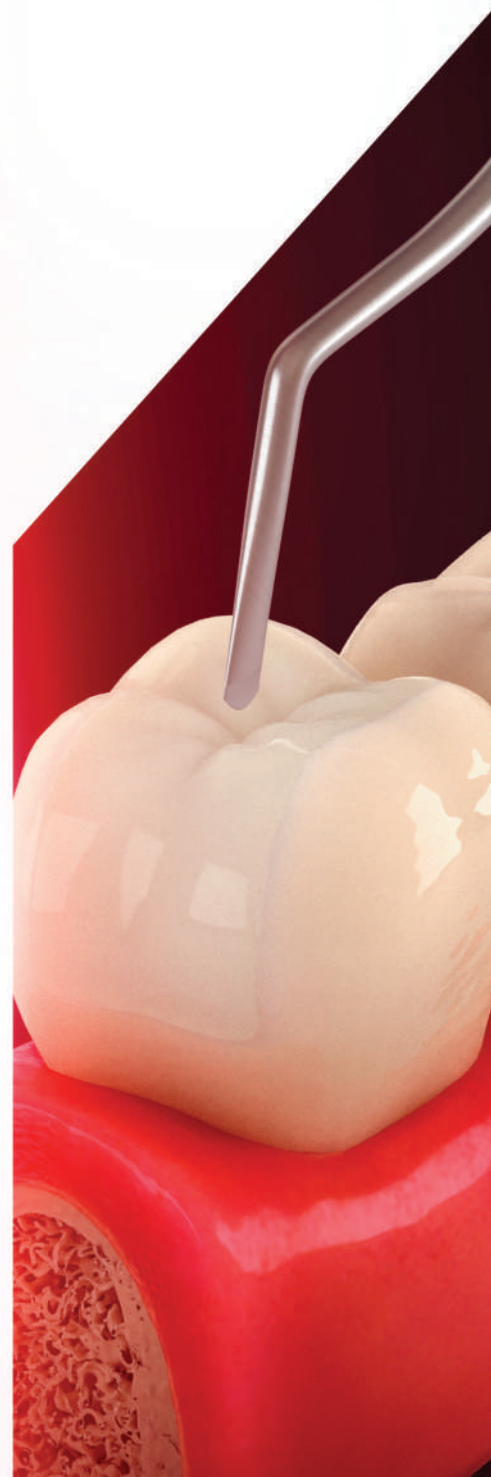

Opus Bulk Fill APS è una resina composita raccomandata per i restauri eseguiti in grandi incrementi. L'esclusiva tecnologia APS offre elevata resistenza meccanica, efficienza e durata dei restauri.

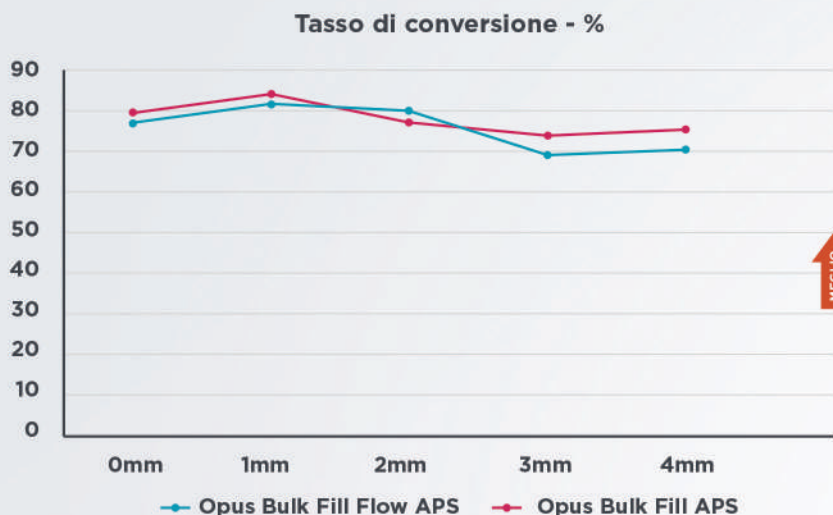


ELEVATO TASSO DI CONVERSIONE

Il tasso di conversione interferisce direttamente sulla qualità del polimero generato. **Opus Bulk Fill APS** e **Opus Bulk Fill Flow APS** hanno dimostrato gradi di conversione elevati anche a grandi profondità. Questa caratteristica contribuisce alle eccellenti prestazioni meccaniche dei compositi.

Fonte: Prof. Dr. Carlos José Soares et al., 2017.

CASO CLINICO

Autori: Prof. Dr. Eduardo Otero Amaral Vargas e Prof. Dr. Dayse Lucia Otero Amaral.

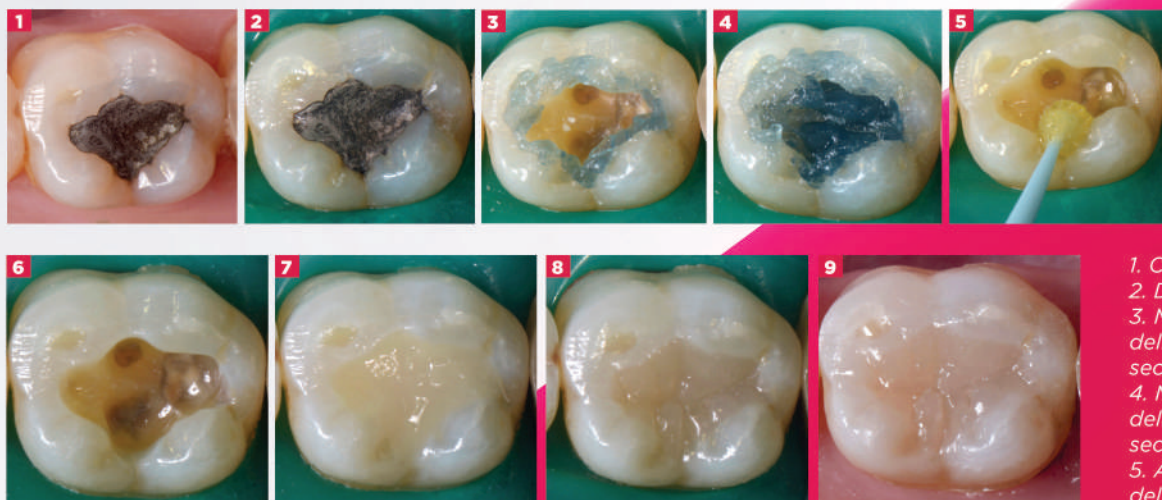

1. Caso iniziale.
2. Dente isolato.
3. Mordenzatura acida dello smalto per 30 secondi (Condac 37).
4. Mordenzatura acida della dentina per 15 secondi (Condac 37).
5. Applicazione dell'adesivo Ambar.

6. Adesivo fotopolimerizzato. 7. Inserimento del composito Opus Bulk Fill APS in un singolo incremento. 8. Restauro finito con isolamento. 9. Restauro finito senza isolamento dopo la lucidatura con dischetti in feltro Diamond (FGM) e pasta lucidante Diamond R (FGM).



DISPONIBILITÀ

RICAMBI

Confezione: 1 siringa con 4g, tonalità A1, A2 o A3.

fgmdental.global

FGM Dental Group International

fgmdental.global

www.fgmdentalgroup.com/it



revello.net

800 491 999

revello
valori e competenze per il dentale