



FILL ROOT REMAKE



PROTOCOLLO OPERATIVO



Dental World s.r.l. Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA) ITALY
tel. +39 080.338.10.04 / fax +39 080.338.66.17
www.dental-world.it / info@dental-world.it

REV.1_01-2023

Sigillanti bioceramici premiscelati.
Cementi idraulici *flow* a base di alluminosilicato di calcio.

PROTOCOLLO OPERATIVO



OTTIMA FLUIDITÀ


TECNICA A FREDDO

PACKAGING - FILL ROOTST codice articolo: 0000182

■ 1 Siringa Fill RootST 2 g. ■ 15 puntali ■ Istruzioni ■ Prezzo listino: € 140,00 + IVA

PACKAGING - REMAKE ROOT^{HT} codice articolo: 0003182

■ 1 Siringa Remake Root^{HT} 2 g. ■ 15 puntali ■ Istruzioni ■ Prezzo listino: € 168,00 + IVA

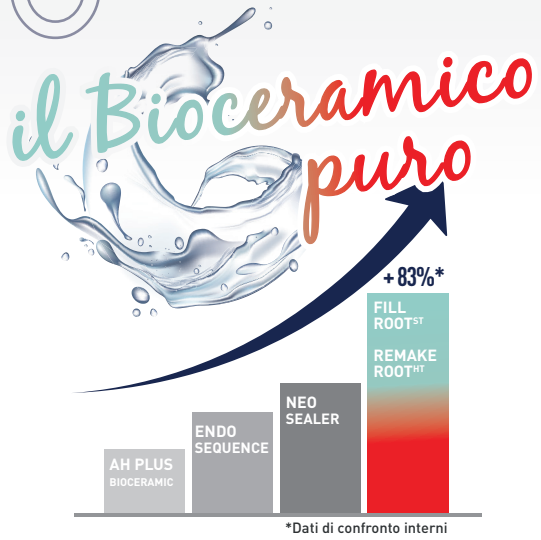

TECNICA 1

5st

PREPARAZIONE DEL CANALE

Inserire il cono master nel canale radicolare utilizzando un movimento di "pumping".

6st

FINITURA

Tagliare il cono master a livello dell'orifizio e condensarlo con un plugger.

COLD TECHNIQUE SINGLE CONE

1

PREPARAZIONE DEL CANALE

Terminare le procedure di irrigazione e asciugare il canale con un cono di carta.

2

SELEZIONARE CONO MASTER

Selezionare e dimensionare il cono master utilizzando un diametro o una conicità precedente all'ultimo strumento di sagomatura.

3

CONNESSIONE PUNTALE E PROVA DI ESTRUSIONE

Collegare il puntale alla siringa e assicurarsi che il prodotto venga estruso correttamente.

4

ESTRUSIONE DEL PRODOTTO

Opzione 1

Inserire il puntale nel canale al terzo medio, ed estrarre il prodotto.

Opzione 2

Estrarre il prodotto su di una piastrina, intingere la punta del cono ed inserirlo nel canale.

TECNICA 2

5^{mwc}

INSERIRE IL CONO MASTER

Inserire il cono master nel canale radicolare utilizzando un movimento di "pumping".

6^{mwc}

MILD WARM COMPACTION

Fase 1

Inserire un portatore di calore fermandosi a 7/8 mm dall'apice, spegnere il compattatore e spingere verso il basso.

Fase 2 / Fase 3

Riaccendere il portatore di calore, tagliando e portando verso l'alto la porzione di cono in eccesso. A questo punto è possibile iniettare della gutta percha calda e condensarla ulteriormente nella porzione coronale del canale.


MILD WARM COMPACTION

- Caratteristiche e Benefici**
- Generazione di idrossido di calcio
 - Sigillatura aderente tridimensionale
 - Generazione di idrossiapatite
 - Legame chimico alla gutta-percha e alla dentina
 - Setting time: lavoro (25 min.)
 - Setting time: totale (2,5 ore)
 - Nessuna contrazione
 - Attivazione in campo umido
 - Resistenza 100 MPa

- Biocompatibile**
- Alluminosilicato di calcio ad alto grado di incontaminazione
 - Privo di resina
 - Privo di eugenolo

- Indicazioni Cliniche**
- Canali lunghi
 - Canali curvi
 - Anatomie complesse
 - Ritratamenti
 - Canali radicolari laterali

- Facile da utilizzare**
- Pronto all'uso
 - Pasta premiscelata iniettabile monocomponente
 - Compatibile con Thermafil

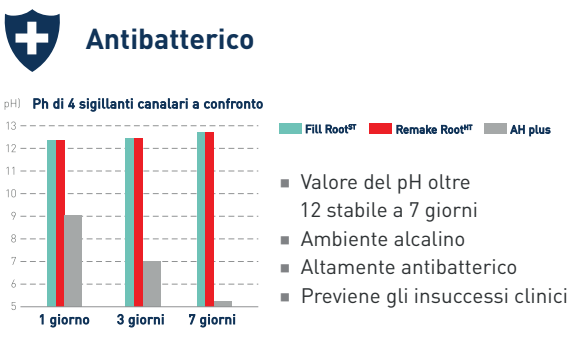

Radiopacità

Fill RootST e Remake Root^{HT} utilizzano ossido di zirconio come agente radiopacizzante con i più alti valori di mercato senza discolorare l'elemento.



Adesione chimica garantita grazie all'idrossiapatite.

Immagine al microscopio del test sulle microinfiltrazioni (test di penetrazione); nessuna infiltrazione rilevata.

TECNICA 3

5^{ht}

EFFETTUARE IL DOWN PACKING

Portare il cono master a lunghezza di lavoro e condensare a 4/5mm dall'apice.

6^{ht}

EFFETTUARE IL BACK PACKING

Aggiungere una piccola quantità di cemento fino a 1mm dall'orifizio canalare e compattare con gutta percha liquida.

HOT TECHNIQUE CONTINUOUS WAVE