



WE  
KNOW  
ENDO.

**MAILLEFER**

WaveOne® Gold

Affronta il canale  
con sicurezza

---

 Dentsply  
Sirona

# Dalla corona alla radice: una soluzione

La gamma WaveOne® Gold offre una soluzione comprensiva di trattamenti, per una sagomatura

## Realizzato con l'innovativa tecnologia reciprocante

### Motore

Ogni angolo, ogni accelerazione, ogni velocità è importante per ottenere il meglio. Il nostro motore offre il supporto meccanico necessario agli strumenti WaveOne® Gold e ProTaper®.



### X-Smart® Plus

**Aggiungi un Plus alla tua procedura:**

Movimento continuo e reciprocante, con 9 sistemi di strumenti pre-programmati.



## Il giusto movimento per un corretto trattamento

# reciprocante completa

predicibile e affidabile.



Glide Path




Sagomatura



Otturazione



Procedure di conservativa  
Dentsply Sirona

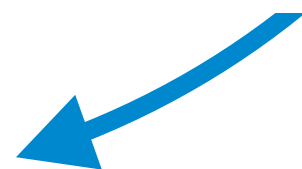

**MAILLEFER**

WaveOne® Gold

WaveOne® Gold Glider ottimizza il glide path prima della sagomatura con gli strumenti principali WaveOne® Gold.\*\*

Gli strumenti WaveOne® Gold sono disponibili in quattro dimensioni e 3 lunghezze di lavoro diverse (21 mm, 25 mm, 31 mm), così da affrontare un'ampia finestra di casi.

La gamma WaveOne® Gold per l'otturazione include le punte di carta, i coni di guttaperca Conform Fit™ e gli otturatori crosslinked GuttaCore®.

Scopri di più sulla conservativa Dentsply Sirona su [dentsplysirona.com](http://dentsplysirona.com)

\*\*internal laboratory testing results



# Accesso al canale in sicurezza



Lo strumento per glide path è stato sviluppato in collaborazione con un'intera squadra di esperti endodontisti:


Dr. E. Berrutti, Dr. G. Cantatore, Dr. A. Castellucci, Dr. S. Kuttler, Dr. W. Pertot, Dr. C. Ruddle, Dr. J. Webber, Dr. J. West.

Un singolo strumento reciprocante per glide path permette di ottimizzare la sagomatura.


- Rispetta la morfologia naturale del canale
- Aumenta la sicurezza del paziente con una maggiore flessibilità e resistenza alla fatica ciclica.
- Sterili e monouso, il che permette di mantenere l'efficienza di taglio, ridurre la possibilità di rottura e prevenire le contaminazioni crociate.

Poiché WaveOne® Gold Glider funziona con le stesse impostazioni di motore di WaveOne Gold, non è necessario riprogrammare il motore durante il trattamento. I motori Dentsply Sirona compatibili dispongono dei programmi già impostati per il movimento reciprocante degli strumenti WaveOne® Gold.

Il trattamento termico in oro fornisce una resistenza minore alla flessione e dunque una maggiore flessibilità rispetto a PathFile.\*\*

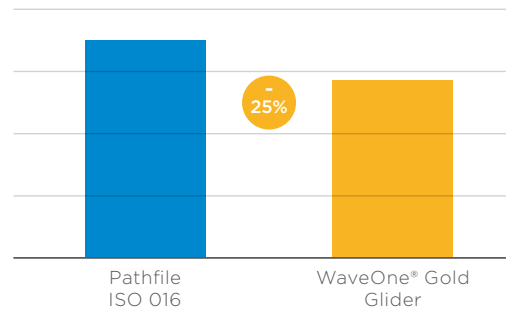

Maggiore resistenza alla fatica ciclica\*\*

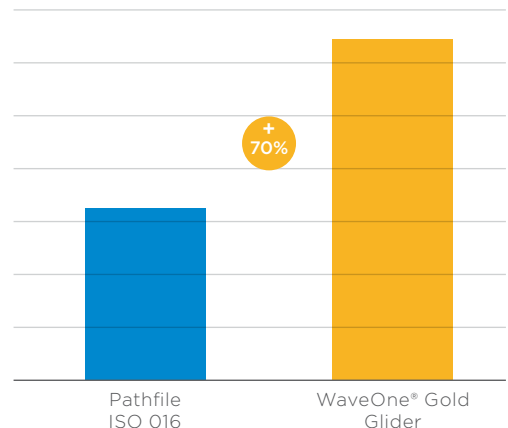

## Una singola sequenza per la maggior parte dei casi

### Sondaggio

ReadySteel®



010 02 - 25mm

### Glide Path

WaveOne® Gold Glider



015 02 - 25mm  
Conicità variabile


### Sagomatura

WaveOne® Gold




Strumento principale,  
025 07 - 25mm  
Conicità variabile

## Stessa sezione di taglio e di movimento degli strumenti per sagomatura WaveOne® Gold

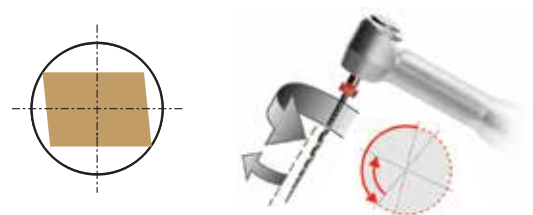


# Semplicità per il clinico, sicurezza per i pazienti


## Resistenza alla fatica ciclica\*\*

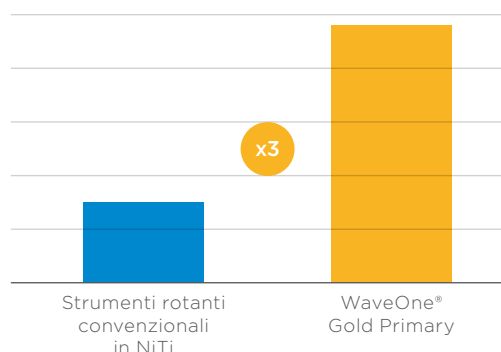

## Tempo di lavoro\*\*

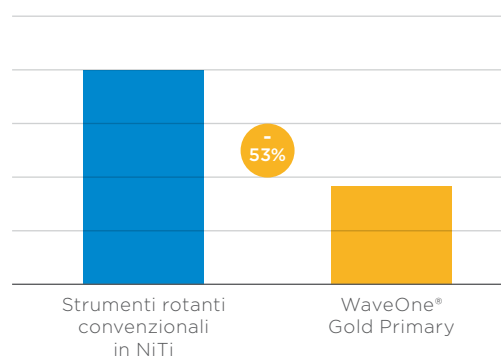

## Flessibilità\*\*

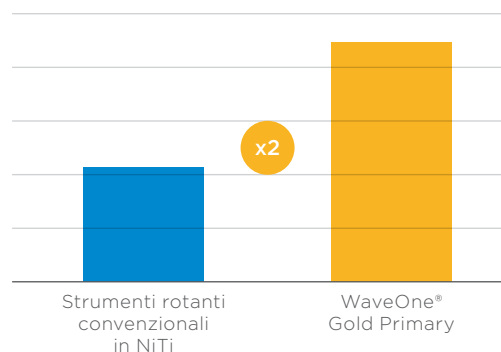

## Maggiore sicurezza per il paziente

- Lo strumento Primary WaveOne® Gold è più resistente del 50% rispetto a WaveOne®
- Effetto di avvitamento\*\* ridotto rispetto agli strumenti rotanti convenzionali


## Riduce il tempo di lavoro

- Efficienza di taglio superiore
- Grazie al singolo strumento, si ottiene più tempo da dedicare alla sagomatura e all'irrigazione

## A copertura di una vasta\* casistica di morfologie canalari

- Flessibilità dello strumento migliorata grazie alla tecnologia Gold
- Ampia gamma e dimensioni

Codice colore ISO

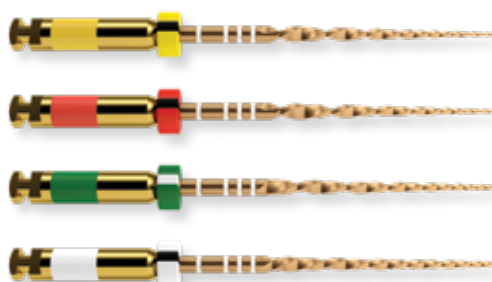

Conicità variabile

020	7%	Misura Small
025	7%	Misura Primary
035	6%	Misura Medium
045	5%	Misura Large

\*Rispetto a WaveOne®

\*\*Esami interni di laboratorio

# La prossima generazione di prestazioni

Dentsply Sirona ha collaborato con i migliori professionisti dell'endodonzia per sviluppare WaveOne® Gold.



*Gentile concessione di Dr. J. Webber*

*Parlano gli sviluppatori – Dr. C. Ruddle, Dr. J. Webber, Dr. W. Pertot, Dr. S. Kuttler*

## Sagomare i canali non è mai stato più semplice

Sin dal lancio nel 2011, WaveOne® ha imposto nuovi canoni nella sagomatura canalare. I dentisti di tutto il mondo hanno apprezzato la semplicità portata da WaveOne nel fornire trattamenti endodontici di qualità ai pazienti.

WaveOne® Gold apporta all'endodonzia la tecnica a singolo strumento, con la metallurgia più avanzata per sagomare i canali. Inoltre, abbiamo ottimizzato i diametri della punta, le conicità e le sezioni di taglio per produrre uno strumento che migliora di molto la sicurezza, l'efficienza e la flessibilità durante la preparazione canalare. WaveOne® Gold porta il successo e il trattamento canalare su un altro livello.

## Guttaperca Conform Fit


# Il nuovo gold standard per l'otturazione a freddo

### Conform Fit™


I coni di guttaperca Conform Fit™ per WaveOne® Gold sono privi di lattice e sono stati riformulati per corrispondere alle forme degli strumenti WaveOne® Gold.

- Trasferimento di calore fino a 4 mm
- Conicità variabile
- Adattamento preciso e resistenza al dislocamento
- Privi di lattice naturale in gomma
- Parte integrante della sistemica completa

### Volume di riempimento apicale della guttaperca\*\*

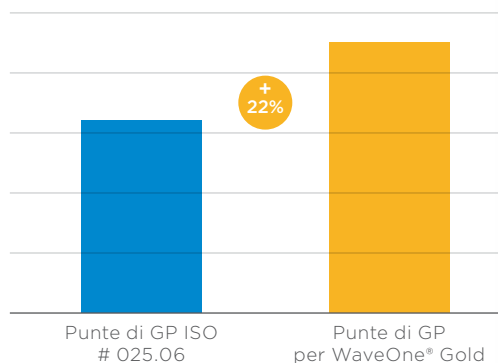

\*\*Esami di laboratorio

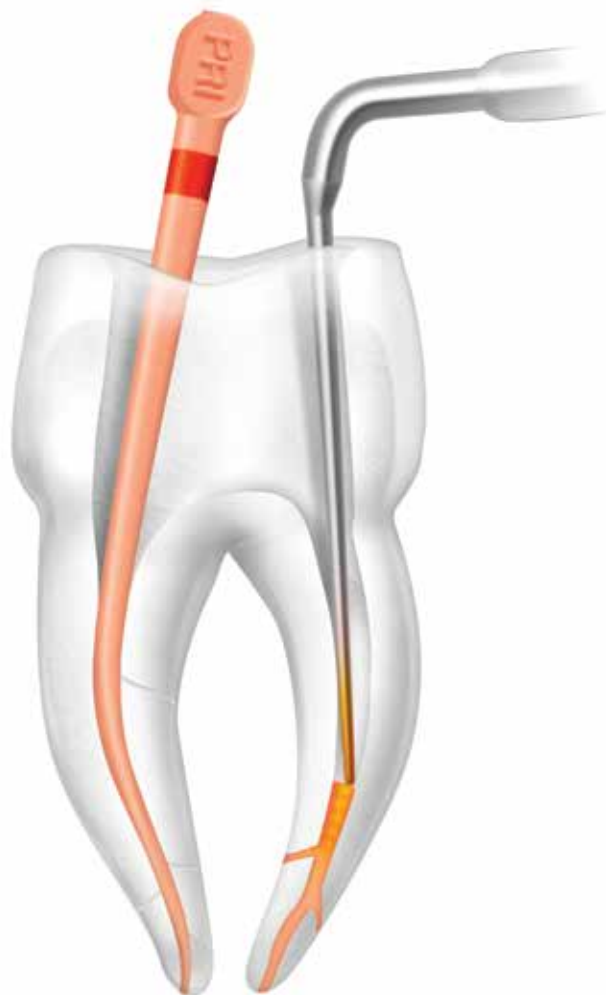

### Punte di carta

- Punte di carta confezionate individualmente in scatole da 5
- Pronte per l'uso e parte del sistema completo



# Per tecnica di otturazione a caldo

## Gutta-Smart™ + Conform Fit™

Soluzione per otturazione senza fili

Ideati per lavorare insieme, GuttaSmart e la guttaperca Conform Fit™ dispongono delle stesse caratteristiche di fluidità a bassa temperatura e della stessa radiopacità per una otturazione verticale a caldo completa.

- Prestazioni durevoli e senza fili
- Batteria sufficiente per tutto il giorno
- Cartucce con la stessa fluidità della guttaperca Conform Fit

\*La batteria dei manipoli Flow e Pack permette di usarli fino a 5 procedure per singola carica.



## GuttaCore® per WaveOne® Gold

Gli otturatori GuttaCore® dispongono di un nucleo in guttaperca che fa fluire la guttaperca circostante in 3 dimensioni, così da seguire la naturale anatomia del canale.

- Tecnica efficiente che offre la semplicità di un singolo inserimento: il paziente passa meno tempo alla poltrona.
- La guttaperca calda ottiene un'otturazione completa in tutto il canale.
- Il clinico ha la sicurezza che GuttaCore® arriva dove la tradizionale guttaperca a freddo non può.



# Codici e confezionamenti

## Strumenti reciprocanti per glide path



### Glider - 015, 02 conicità variabile

3x	21mm	B ST WIGG 321 015
3x	25mm	B ST WIGG 325 015
3x	31mm	B ST WIGG 331 015
6x	21mm	B ST WIGG 621 015
6x	25mm	B ST WIGG 625 015
6x	31mm	B ST WIGG 631 015

## Punte di carta per WaveOne® Gold



### Confezione da 180 punte di carta sterili

Small	A 175W 000 00S 03
Primary	A 175W 000 00P 03
Medium	A 175W 000 00M 03
Large	A 175W 000 00L 03

## Strumenti reciprocanti per sagomatura



### Small - 020, 07 conicità variabile

3x	21mm	A 0753 221 GOS 03
3x	25mm	A 0753 225 GOS 03
3x	31mm	A 0753 231 GOS 03
6x	21mm	A 0756 221 GOS 03
6x	25mm	A 0756 225 GOS 03
6x	31mm	A 0756 231 GOS 03



### Primary - 025, 07 conicità variabile

3x	21mm	A 0753 221 GOP 03
3x	25mm	A 0753 225 GOP 03
3x	31mm	A 0753 231 GOP 03
6x	21mm	A 0756 221 GOP 03
6x	25mm	A 0756 225 GOP 03
6x	31mm	A 0756 231 GOP 03



### Medium - 035, 06 conicità variabile

3x	21mm	A 0753 221 GOM 03
3x	25mm	A 0753 225 GOM 03
3x	31mm	A 0753 231 GOM 03
6x	21mm	A 0756 221 GOM 03
6x	25mm	A 0756 225 GOM 03
6x	31mm	A 0756 231 GOM 03



### Large - 045, 05 conicità variabile

3x	21mm	A 0753 221 GOL 03
3x	25mm	A 0753 225 GOL 03
3x	31mm	A 0753 231 GOL 03
6x	21mm	A 0756 221 GOL 03
6x	25mm	A 0756 225 GOL 03
6x	31mm	A 0756 231 GOL 03

### Strumenti assortiti

#### 1x Small/Primary/Medium/Large

21mm	A 0754 221 G9A 03
25mm	A 0754 225 G9A 03
31mm	A 0754 231 G9A 03

### WaveOne® Gold blister con sequenza base

25mm	B ST WIGS 325 AST
------	-------------------



## Kit e motori

### Kit WaveOne Gold con X-Smart Plus

A103581000000

- 1 motore endodontico X-Smart Plus
- 1 contrangolo X-Smart Plus
- 15 strumenti WaveOne Gold Primary 25 mm
- 16 strumenti WaveOne Gold assortiti 25 mm
- 3 Proglider 25 mm

### Motore endodontico

X-SMART® Plus

A1032



### Guttaperca Conform Fit™ per WaveOne® Gold



Confezioni da 60 coni di gutta-perca a conicità variabile

Small	B00WGGPF00SML
Primary	B00WGGPF00PRI
Medium	B00WGGPF00MED
Large	B00WGGPF00LRG
Assortite	B00WGGPF00AST

### Fornetto ThermaPrep® 2



230V (EU)

A 0176 230 002 00

### Gutta-Smart dispositivo per otturazione senza fili

Gutta-Smart Kit

B00GSIQ000KIT



- 1 manipolo Flow
- 1 manipolo Pack
- 1 base di ricarica
- 2 cartucce di gutta-perca
- 3 pluggers elettrici
- 1 riscaldatore
- 1 accessorio per la curvatura dell'ago della cartuccia
- 1 alimentatore + 4 adattatori universali
- 2 protezioni per la pulizia dei manipoli



### Cartucce di gutta-perca Conform Fit per Gutta-Smart



10x	Cartuccia da 20G	BNSGSIQA0020G
10x	Cartuccia da 23G	BNSGSIQA0023G
10x	Cartuccia da 25G	BNSGSIQA0025G

### GuttaCore® per WaveOne® Gold



Blister da 6 otturatori

Small	B NS GCWG 500 SML
Primary	B NS GCWG 500 PRI
Medium	B NS GCWG 500 MED
Large	B NS GCWG 500 LRG

Confezione da 30 otturatori (5 blister)

Small	B NS GCWG C00 SML
Primary	B NS GCWG C00 PRI
Medium	B NS GCWG C00 MED
Large	B NS GCWG C00 LRG



Dentsply Sirona Italia SRL  
Piazza dell'Indipendenza 11B  
00185 Roma  
dentsplysirona.com

